

# Omnican® fine

Die richtige Nadel für jeden Typ



B. Braun DiabetesCare

# Omnican® fine

## Vierfach sanft. Einfach überzeugend.



### Die richtige Nadel für jeden Typ

Je besser eine Penkanüle einem Typ entspricht, desto sanfter und präziser erfolgt auch die Insulininjektion. Und da nicht alle Menschen gleich sind, gibt es Omnican® fine Penkanülen in 4 verschiedenen Ausführungen.

Mit 6, 8, 10 und 12 mm Länge, Thin-Wall-Technologie sowie dem präzisen Drei-Facetten-Schliff bieten wir für jeden Typ die optimale Penkanüle. Selbstverständlich passend für alle gängigen Pensysteme.

Manchmal ist weniger mehr! Bei den neuen Omnican® fine Penkanülen haben wir auf die innere Nadelkappe verzichtet. Für den Anwender bedeutet dies einen Handlungsschritt weniger – bei voller Funktion.

Zudem werden wir den Sicherheitsaspekten beim Umgang mit Kanülen vollends gerecht:

- Minimierung des Risikos einer Nadelbeschädigung beim Abziehen
- Verhinderung der Wiederverwendung (Recapping) und somit Prävention von Nadelstichverletzungen.



**Omnican® fine**

Nadel-ø: 31G – 0,25 mm  
Nadellänge: 6 mm

Für Injektionen bei geringem Unterhautfettgewebe, an Alternativstellen oder ohne Hautfalte



**Omnican® fine**

Nadel-ø: 31G – 0,25 mm  
Nadellänge: 8 mm

Für Injektionen bei normalem Unterhautfettgewebe



**Omnican® fine**

Nadel-ø: 30G – 0,30 mm  
Nadellänge: 10 mm

Für Injektionen bei ausgeprägtem Unterhautfettgewebe




**Omnican® fine**

Nadel-ø: 29G – 0,33 mm  
Nadellänge: 12 mm

Für Injektionen bei besonders ausgeprägtem Unterhautfettgewebe

Omnican® fine	Größe	Länge	PZN	REF	VE
Penkanülen ohne innere Nadelkappe	● 31G	6 mm	7028645	9167668	1 Karton
	● 31G	8 mm	7028639	9167684	1 Karton
	● 30G	10 mm	6080282	9167625	1 Karton
	● 29G	12 mm	6080276	9167641	1 Karton

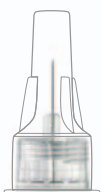



100 Stück im Spenderkarton

Omnican® fine	Größe	Länge	PZN	REF	VE
Penkanülen mit innerer Nadelkappe	● 30G	8 mm	0411832	9168982	1 Karton
	● 29G	12 mm	7328488	9168990	1 Karton

100 Stück im Spenderkarton

# Omnican® fine

## High-Tech vom Injektionsspezialisten

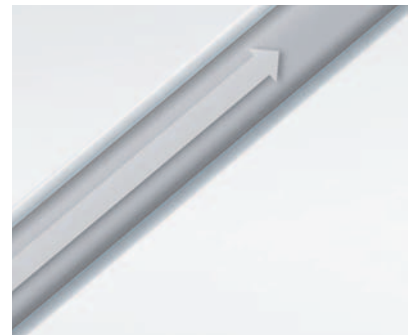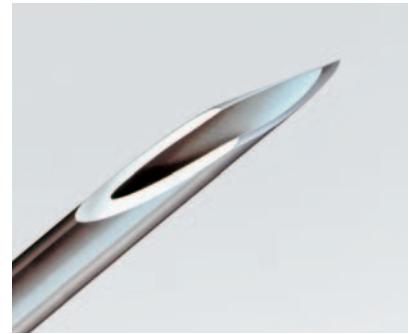

### Einfache und sichere Handhabung

Das Schraubgewinde sorgt für einen festen und sicheren Sitz der Kanüle. Ein gleichmäßiger Insulinfluss ist gewährleistet.

### Thin-Wall-Technologie

Der große Innendurchmesser ermöglicht selbst bei den dünnsten Omnican® fine Kanülen einen optimalen Insulinfluss.

### Kaum wahrnehmbarer Einstich

Omnican® fine Penkanülen stehen für eine nahezu schmerzfreie Injektion. Durch den hochfeinen Drei-Facetten-Schliff und die Siliconbeschichtung dringt die Kanüle kaum spürbar ein.


## Kompatibel mit allen gängigen Pen-Injektionssystemen

	Omnican® Pen 31, 32	B. Braun
	BerliPen® 301, 302	Berlin Chemie
	BerliPen® areo, areo 2	Berlin Chemie
	Byetta™ Pen	Eli Lilly
	HumaPen® Ergo	Eli Lilly
	HumaPen® Luxura	Eli Lilly
	Humalog® Pen	Eli Lilly
	Diapen® 3.1, 3.2	Haselmeier
	FlexPen®	Novo Nordisk
	NovoLet®	Novo Nordisk
	NovoPen® 3, 4	Novo Nordisk
	Autopen®	Owen Mumford
	OptiClik®	sanofi-aventis
	OptiPen® Pro 1/2	sanofi-aventis
	OptiPen®	sanofi-aventis
	OptiSet®	sanofi-aventis
	SoloStar®	sanofi-aventis
	TactiPen®	sanofi-aventis
	Ypsopen®	Ypsomed

Die aufgeführten Marken sind Eigentum der genannten Firmen

### Sicherheit geht vor

Penkanülen sind sterile, hoch präzise medizinische Einmalprodukte. Nur die einmalige Verwendung kann garantieren, dass jeder Einstich hygienisch, sicher und schmerzarm ist. Bei einer wiederholten Verwendung ist die Nadel nicht mehr steril. Die feine Silikon-Gleitschicht wird abgerieben, die Nadelspitze stumpft ab und deformiert sich. Die Kanüle kann durch anhaftende Gewebsreste oder kristallisiertes Insulin verstopfen, was eine korrekte Insulinzufuhr nicht mehr sicherstellt. Vermeiden Sie Risiken und wechseln Sie die Penkanüle nach jeder Injektion.

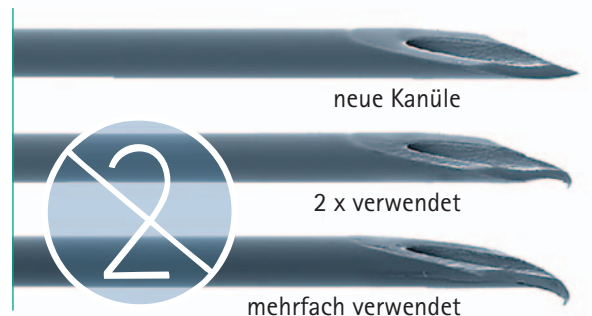


# Omnican® fine

## Für mehr Sicherheit



### Benutzerfreundliches Handling

Griffiges Aufschrauben dank der Längsrippen auf der Außenseite  
... für große und kleine Hände.

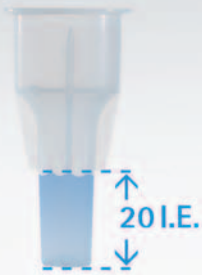

### Überprüfung der Insulinabgabe

Die Insulinabgabe des Pens kann mit Hilfe der Schutzkappe schnell und zuverlässig kontrolliert werden:  
Einfach den Pen auf 20 I.E. stellen und in die Kappe spritzen.  
Ist sie bis zu den äußeren Längsrippen gefüllt, ist die Insulinabgabe korrekt.



### Sichere Entsorgung

Die benutzte Kanüle wird mit Hilfe der Schutzkappe vom Pen abgeschraubt und kann sicher entsorgt werden. Medizinisches Personal und pflegende Angehörige sollten die Recapping-Vorrichtung der Medibox® nutzen.

## Omnican® fine mit vereinfachter Handhabung


Noch immer stellen Nadelstichverletzungen durch „Recapping“ eine unterschätzte Gefahr dar. Das manuelle Wiederaufsetzen der einmal abgenommenen Nadelkappe ist für medizinisches Personal die häufigste Ursache für infektiöse Stichverletzungen und daher bereits per Gesetz verboten.

Auch Privatanwender sollten alte Gewohnheiten überdenken und Risiken durch Recapping vermeiden:

- Beschädigung der Kanüle beim Abziehen und damit Verletzungsgefahr bei der Injektion
- Wegen des geringen Durchmessers der inneren Nadelkappe birgt das manuelle Wiederaufsetzen die Gefahr von Stichverletzungen

**Keine innere Nadelkappe = kein Recapping.**

Deshalb die neue Omnicar® fine für eine komfortable und sichere Injektion.

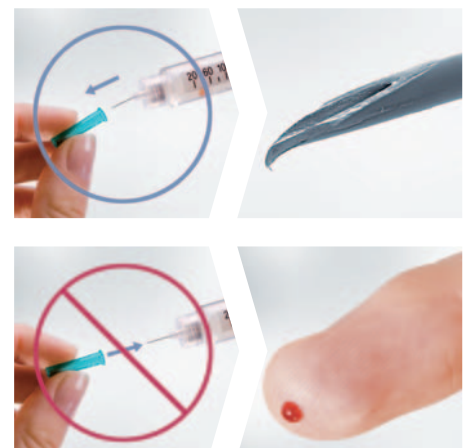



## Medibox® 0,7 L

Der Kanülensammler ist die optimale Lösung für eine sichere und schnelle Entsorgung benutzter Penkanülen und natürlich aller anderen Kanülen.

- Füllvolumen: 0,7 L in handgerechter Form
- Extra starke Behälterwand, bruch- und durchstichsicher
- Sicherer Endverschluss für die Entsorgung
- Erfüllt die Anforderungen der TRBA 250


Größe	PZN	REF	VE
Medibox® 0,7 L*	5368615	9193405	1 Box

\* Die Volumenangabe in Liter bezieht sich auf das empfohlene maximale Füllvolumen (= 80% des Gesamtvolumens der Behälter).

### Entsorgung mit System

Neben Kanülen mit Luer-Lock können mit der Medibox® auch Penkanülen sicher entsorgt werden. Einfach Kanüle einstecken und abdrehen!

Die spezielle Recapping-Vorrichtung erlaubt das sichere Wiederaufsetzen von Schutzkappen auf Kanülen.

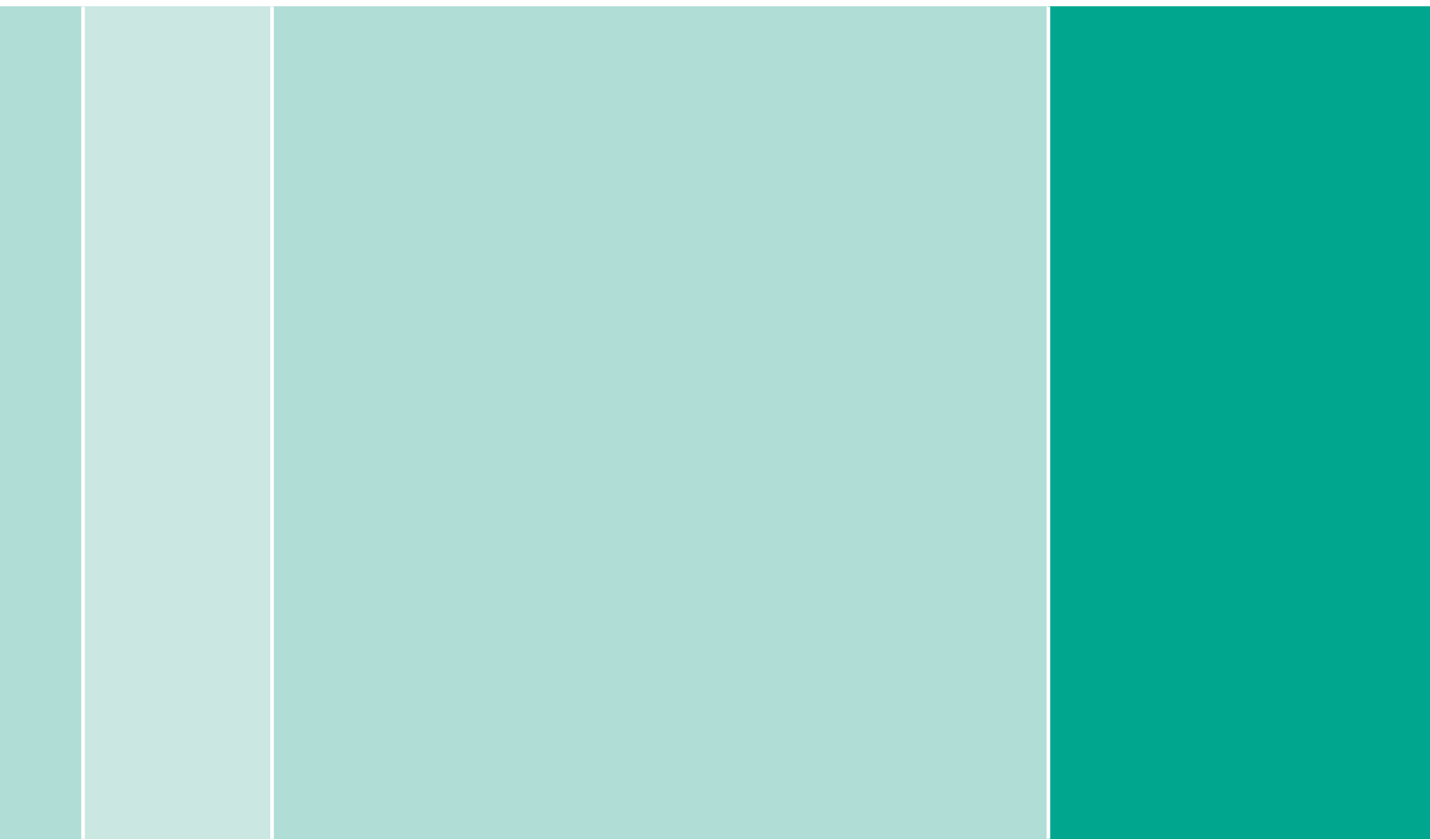

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche?  
Wir sind für Sie da. Freundlich, zuverlässig, kompetent.

**Kostenfreie Service-Nummer**  
**0800 101 23 43**  
**[www.diabetes.bbraun.de](http://www.diabetes.bbraun.de)**

B. Braun Melsungen AG | OPM  
Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen | Deutschland  
Tel (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)