



Sekusept® MultiEnzyme

ZUR VORREINIGUNG MEDIZINISCHER INSTRUMENTE

- ▲ Hohe Anwenderfreundlichkeit
- ▲ Maximale Materialverträglichkeit
- ▲ RKI-konforme, nicht fixierende Vorreinigung



Sekusept® MultiEnzyme

ZUR MANUELLEN VORREINIGUNG MEDIZINISCHER INSTRUMENTE

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Innovative Kombination aus vier Enzymen mit leistungsstarken Tensiden	Starke, selbsttätige Reinigung. Reduziert den Vor- und Nachreinigungsaufwand. RKI-konforme Vorreinigung.
Umfassende Materialverträglichkeit	Geeignet für die Vorreinigung von thermolabilen und thermostabilen medizinischen Instrumenten und flexiblen Endoskopen
Schaumarm	Gute Sichtbarkeit der Instrumente bei Verwendung in Instrumentenwanne und Ultraschallbad
2 L Flaschen mit Sichtfenster	Optimale Füllstandskontrolle und sichere Dosierung
6 L Kanister	Wirtschaftliche Variante für die Dosierung mittels Dosiergerät z. B. DG1, DG3
Transparent-blaue Einfärbung	Sichtbare Reinigungslösung bei guter Erkennbarkeit der Instrumente
Frischeduft	Angenehme Anwendung, ohne deklarationspflichtige Duftstoffkomponenten

Chemisch-physikalische Daten		
Dichte	20 °C	1,06 g/cm ³
pH-Wert* (Konzentrat)	20 °C	ca. 6,4
pH-Wert* (1-2 %-ige Lösung)	20 °C	ca. 6-7

*pH-Wert Messungen unter Betriebsbedingungen immer mittels pH-Meter mit Temperaturkompensation.



Reinigung von Medizinprodukten



EINSATZBEREICHE

Enzymatischer Reiniger für die Vorreinigung von thermostabilen und thermolabilen, medizinischen Instrumenten inkl. flexibler Endoskope. Auch für die Verwendung im Ultraschallbad geeignet.

ANWENDUNGSHINWEISE

In Abhängigkeit von Verschmutzungsart und dem Grad der Anschmutzung eine 0,5 bis 2,0 %ige Anwendungslösung ansetzen (5-20 ml pro Liter Wasser). Instrumentarium in die Lösung einlegen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit je nach Verschmutzungsgrad (min. 5 - 15 Minuten).

Instrumente vor weiterer maschineller / manueller Aufbereitung abspülen. Keine Unverträglichkeiten mit anderen Wirkstoffen bei geringer Verschleppung von Reinigungslösung.

Bitte beachten Sie die Angaben der Instrumentenhersteller. Nur für den professionellen Gebrauch.

ZUSAMMENSETZUNG

Proteasen, Amylase, Lipase, Tenside, Korrosionsinhibitoren, Lösemittel, Hilfsstoffe, Emulgatoren, Parfüm.


GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Sekusept® MultiEnzyme 30 466 50
Griffflasche mit Messbecher 4 x 2 L

Sekusept® MultiEnzyme 30 466 70
Kunststoffkanister 6 L

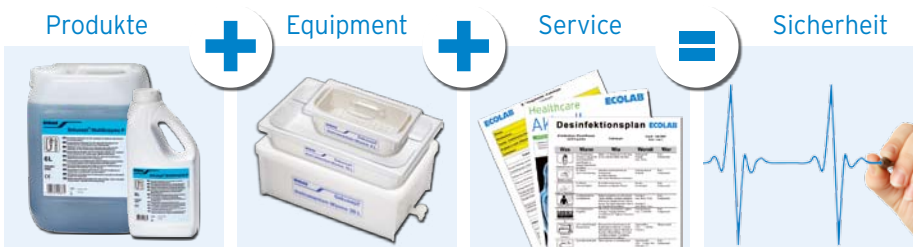

UNSERE HYGIENELEISTUNGEN SCHÜTZEN LEBEN ...

Worldwide Headquarters
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

Regional Office
Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstr. 38-42
40589 Düsseldorf
Phone +49 (0) 211 98 93-0
Fax +49 (0) 211 98 93-174
www.ecolabhealthcare.de

Regional Office
Ecolab Schweiz GmbH
Kriegackerstr. 91
CH-4132 Muttenz
Phone +41 (0) 614 66 94-66
Fax +41 (0) 614 66 94-55
www.ecolab-suisse.ch

