

Bedienungsanleitung Einmalschuh-Dispenser



www.shoe-cover-dispenser.de



dr. paul koch gmbh
Im Geiselrain 7
72636 Frickenhausen
Fon: 07022.40595.0
Fax: 07022.40595.55
Mail: info@dr-koch.de
www.dr-koch.de

Bedienungsanleitung Einmalschuh-Dispenser



Bestückung des Dispensers

Abb. 1:
Nehmen Sie die Zierblende
vorsichtig ab.

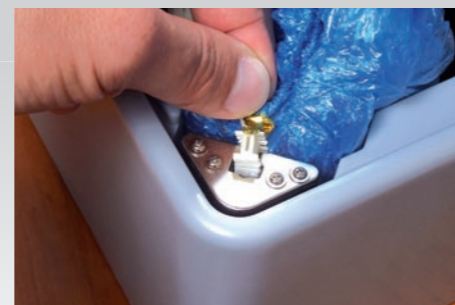


Abb. 2:
Vergewissern Sie sich, dass der
Einmalschuh-Nachfüllstapel vor
dem Einsetzen korrekt ausgerichtet
ist (Länge - Breite). Die offene Seite
muss nach oben zeigen.
Setzen Sie nun einen Stapel der
Kunststoff-Clips in die entsprechen-
de Aufnahme ein (siehe Abb.).



Abb. 3:
Hängen Sie dann die diagonal
gegenüberliegende Seite ein (siehe
Abb.) und danach die beiden übrigen
Seiten.
Sollten sich noch Einmalschuhe eines
vorherigen Stapels im Dispenser
befinden, drücken Sie die Kunststoff-
clips beider Stapel fest zusammen.
Streichen Sie nun die Einmalschuhe
mit den Händen gleichmäßig aus.



Abb. 4:
Öffnen Sie nun den Bindedraht an
den Ecken des Einmalschuh-Stapels.



Abb. 5:
Wenn alle Ecken befestigt sind,
prüfen Sie bitte, ob die oberen Clips
in allen vier Ecken einen Abstand von
1 mm zur Oberfläche einhalten. Falls
nicht, ziehen Sie den Clip-Stapel bitte
mit der Hand bis auf 1 mm Abstand
nach oben.

Bedienungsanleitung Einmalschuh-Dispenser



Verwendung

Steigen Sie mit einem Fuß
sanft in den Dispenser. So-
bald der Fuß auf dem Boden
steht, wird ein Einmalschuh
automatisch um Ihren Fuß
gezogen.



Verfahren Sie mit dem
anderen Fuß genauso.



Wir empfehlen nicht mehr als
30-40 Einmalschuhe auf ein-
mal in den Behälter zu füllen.

Instruction Manual Shoe Cover Dispenser



www.shoe-cover-dispenser.de



dr. paul koch gmbh
Im Geiselrain 7
72636 Frickenhausen · Germany
Fon: ++49.(0)70 22.405 95.0
Fax: ++49.(0)70 22.405 95.55
Mail: info@dr-koch.de
www.dr-koch.de

Instruction Manual Shoe Cover Dispenser



How to load the shoe cover dispenser

No. 1:
Carefully remove the decorative cover.



No. 2:
Make sure that the length and width of the shoe cover pack matches the dispenser in the right direction. Spread a pack of new shoe covers and put them directly into the T-model which is in the corner of the dispenser.



No. 3:
Fix opposite corners first.



No. 4:
Untie the ropes from the shoe cover pack.



No. 5:
Pay attention: After putting the shoe covers in, make sure to smooth them out before you step in. If all corners are fixed, please check if the top clips are holding the distance of 1 mm. If not please use your hands and pull the clip-pack up to a distance of 1 mm.

Instruction Manual Shoe Cover Dispenser



How to use

Put your foot gently into the dispenser. As soon as your foot reaches the ground it will automatically be covered.



Proceed in the same way with the other foot.



We suggest not to load the dispenser with more than 30-40 shoe covers at one time.