

## Rundum sanfte Blutgewinnung.

### Spezieller Lanzettenschliff

Jede Accu-Chek Lanzette hat einen abgeschrägten, 3-seitigen Schliff mit besonderer Winkelstellung – das Ergebnis intensiver Forschungsarbeit.

Dieser spezielle Schliff ermöglicht zusammen mit der polierten Oberfläche ein nahezu reibungsloses und sanftes Eindringen in die Haut.



### Hohe Lanzettengeschwindigkeit

Die Accu-Chek Lanzette benötigt nur ca. 2 Millisekunden, um die Haut zu durchdringen. Die Schmerzempfindung reduziert sich dadurch spürbar, denn je kürzer der Piks, desto weniger werden die Nervenfasern gereizt.

### Individuelle Stechtiefe

Die Stechtiefe der Accu-Chek Stechhilfen ist individuell auf die Hautbeschaffenheit einstellbar. Auf diese Weise dringt die Lanzette nur so tief ein wie nötig. Weniger Nervenfasern werden gereizt, Gewebeerletzungen minimiert – für eine sanfte und hautschonende Blutgewinnung.

### Hygienischer und einfacher Lanzettenwechsel

Accu-Chek Lanzetten können bei allen Accu-Chek Stechhilfen ohne direktes Berühren eingesetzt und entsorgt werden. Da die Lanzetten in die Haut eindringen, sind keimfreie Lanzetten sehr wichtig. Nur neue, unbenutzte Accu-Chek Lanzetten sind garantiert steril.



Zur Vorbeugung gegen Infektionen empfehlen wir, jede Lanzette nur einmal zu benutzen.

## ACCU-CHEK® Stechhilfen

## Sanft in jeder Ausführung.



### ACCU-CHEK® Softclix

#### Besonders klein und handlich

- Einfache Handhabung
- Praktische Lanzettenauswurf Funktion
- 11 unterschiedliche Stechtiefen



### ACCU-CHEK® Multiclix

#### Lanzettenwechsel mit einem Dreh

- Clevere Lanzetten-Trommel mit sechs Lanzetten
- Hygienischer, einfacher und schneller Lanzettenwechsel dank der Trommel-Technologie
- 11 unterschiedliche Stechtiefen



### ACCU-CHEK® Softclix Pro

#### Die professionelle Stechhilfe mit Einmal-Lanzetten für die Arztpraxis

- Besonderer Mechanismus: verhindert die mehrmalige Verwendung der Lanzette
- Integrierte Plattform der Lanzette: keine Gefahr einer Kreuzinfektion
- Praktische Lanzettenauswurf Funktion
- 3 unterschiedliche Stechtiefen

Bei Fragen rufen Sie bitte unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Accu-Chek Kunden Service Center an. Gerne stehen wir Ihnen von Mo. bis Fr. von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter der Telefonnummer **0180-200 0165** (6 Cent pro Gespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom) zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.accu-chek.de/multiclix](http://www.accu-chek.de/multiclix) und [www.accu-chek.de/softclix](http://www.accu-chek.de/softclix). Besuchen Sie uns auch unter [www.accu-chek.de](http://www.accu-chek.de) mit vielen kostenlosen Services – informativ und aktuell.



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MULTICLIX und SOFTCLIX sind Marken von Roche.

[www.accu-chek.de](http://www.accu-chek.de)  
Roche Diagnostics GmbH  
D-68298 Mannheim



## Sanftheit ist unsere Natur.

## ACCU-CHEK® Stechhilfen

Besonders sanft durch die patentierte Technologie der dual geführten Lanzette.



**ACCU-CHEK®**  
Leben. So wie ich es will.

## Sanftheit bis in die Fingerspitzen.

**So kontrolliert, so schnell: selbst für die feinsten Sinne kaum zu spüren.**

Wir wissen, dass die Fingerspitzen besonders empfindsam sind. Die Blutgewinnung muss daher so sanft und behutsam sein, dass es selbst für Kinder nur ein kleiner Piks ist, fast wie ein sanftes Kribbeln.

Um das zu erreichen, spielen bei Accu-Chek Stechhilfen mehrere technische Besonderheiten zusammen. Eine davon ist unsere patentierte Technologie der dual geführten Lanzettenbewegung: Softmotion.




## Sanft rein, fein raus – mit Softmotion.

**Die patentierte Softmotion Technologie ermöglicht die sanfte Blutgewinnung.**

Softmotion ist das Prinzip der dual geführten Lanzettenbewegung, d.h. sowohl die Vor- als auch die Rückwärtsbewegung der Lanzette werden präzise gesteuert. Nahezu vibrations- und schwingungsfrei. Diese besondere Bewegung ist mit entscheidend für die sanfte Blutgewinnung.

Die Lanzette dringt in einer geradlinigen, sehr schnellen Vorwärtsbewegung in die Haut ein. Unnötige Hautverletzungen werden dadurch vermieden.


### Vereinfachte Darstellung der Softmotion Technologie

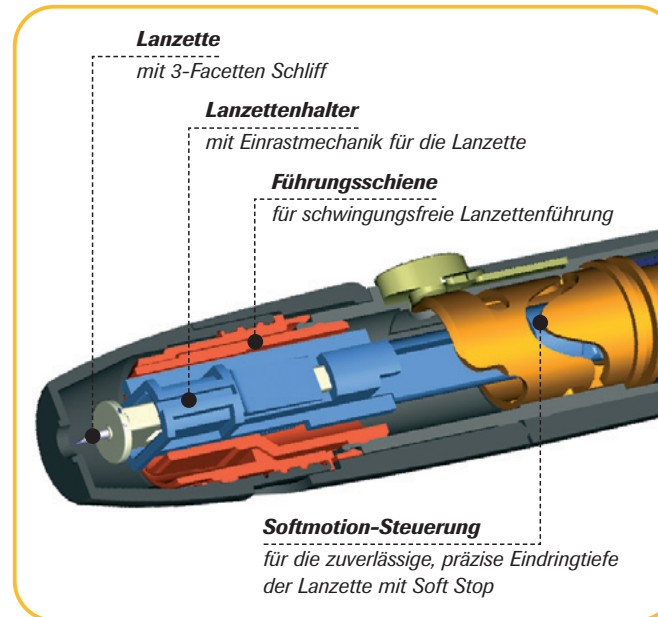

**Eine kontrollierte Bewegung bis zum Schluss.**


In der Haut wird die Lanzette durch den Soft Stop sanft gestoppt und sofort wieder aktiv mit einer geradlinigen Bewegung zurückgeführt. Diese kontrollierte Bewegung ist so schnell und präzise, dass die Haut spürbar geschont wird. Jede Accu-Chek Stechhilfe ist mit der patentierten Softmotion Technologie ausgestattet.

### Softmotion Technologie

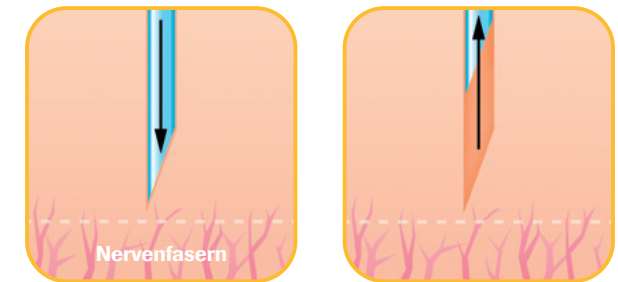

Dual geführte Accu-Chek Lanzette mit schwingungsfreier Vorwärts-/Rückwärtsbewegung und Soft Stop.

### Beispiel einer konventionellen Technologie

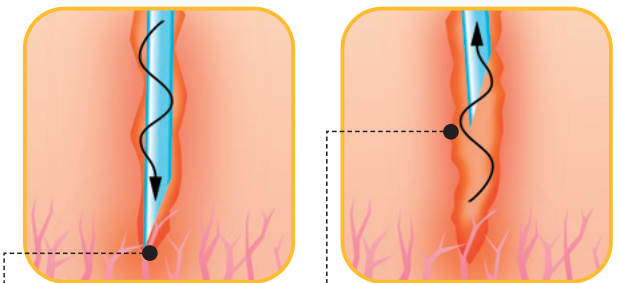

Einfach geführte Lanzette dringt ohne Soft Stop bis zu den Nervenenden vor.

Durch Schwingungen der Lanzette entstehen zusätzlich schmerzhafte Geweschäden.