

Tricodur[®]

Manus

Handgelenkorthese

Größe		cm	REF	REF
	S/M	14 - 19	02711-01	02711-00
	L/XL	19 - 23	02713-01	02713-00
	S/M	14 - 19	02712-01	02712-00
	L/XL	19 - 23	02714-01	02714-00

**LATEX
FREE
FORMULA**

Nicht mit
Naturkautschuklatex
hergestellt

MD Medizinprodukt



essity

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24,
20253 Hamburg, Germany
www.bsnmedical.com

JBR 13249.01 07/2019



D

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für Tricodur® Manus entschieden haben.

Tricodur® Manus ist eine stabilisierende Handgelenkorthese aus Stoff mit mehreren Stabilisierungsstäben zur Behandlung schmerzhafter Zustände und Irritationen des Handgelenkes, wie sie bei chronischen oder akuten Erkrankungen auftreten. Hergestellt aus qualitativ hochwertigen, latexfreien Materialien, ist dieses Produkt sehr atmungsaktiv und bietet hervorragenden Tragekomfort. Eine anatomisch geformte, orthopädische Schiene und ein elastisches, extrabreites Klettband sorgen für hohe Stabilität und starken Halt. Dank der schlauchartigen Konstruktion kann die Orthese leicht mit nur einer Hand angelegt werden. Tricodur® Manus unterstützt das Handgelenk und sorgt für Schmerzlinderung, ohne dabei die Beweglichkeit der Finger einzuschränken.

Bitte befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen. Gute Besserung!

Anwendungsgebiete:

Das Produkt wird zur Unterstützung und Stabilisierung des Handgelenks verwendet.

Die Anwendungsgebiete umfassen:

- Entzündungen, z.B. Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung)
- Distorsionen (Verstauchungen) und Zerrungen
- Sehnen-, Band- und Weichteilverletzungen
- Arthrose
- rheumatoide Arthritis
- postoperative Versorgung
- Stabilisierung nach Gipsverband

Wenn Sie unsicher sind, ob das Produkt für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Gebrauchsanweisung:

Streifen Sie Ihre Tricodur® Manus wie einen Handschuh über Ihr Handgelenk, wobei Sie Ihren Daumen in die dafür vorgesehene Öffnung platzieren (Abb. 1).

Schließen Sie zuerst das untere Klettband (Abb. 2), dann das obere (Abb. 3) und abschließend das mittlere Klettband (Abb. 4).

Legen Sie Ihre Orthese mit mäßigem Druck an, sodass diese angenehm sitzt und die Beweglichkeit Ihrer Finger nicht beeinträchtigt.

Reinigung und Pflege:

Tricodur® Manus ist für die Hand- und Maschinenwäsche geeignet (bei 30 °C / 86 °F-Schonwaschprogramm). Bitte nicht bleichen, chemisch reinigen, trocknen oder bügeln. Achten Sie darauf, dass die Orthese vollständig trocken ist bevor Sie sie wieder anlegen.

Achtung:

Bitte entfernen Sie vor dem Waschen unbedingt die Aluminiumschiene aus deren Ummantelung und schließen Sie die Klettbänder!

Anmerkung:

Melden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle der BSN medical GmbH und Ihrer lokalen zuständigen Behörde.

Height = 200 mm