

Instru Suc

Produktinformation

Produktbeschreibung

Instru Suc ist ein universelles, sparsames, schaumarmes und aldehydfreies Konzentrat zur Desinfektion von Absauganlagen.

Anwendungsgebiet

Instru Suc wird zur Desinfektion von Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider eingesetzt.

Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid

Anwendungshinweise

Biofilmvermeidung

Die tägliche Desinfektion mit einer 2%igen Gebrauchslösung kann eine Biofilmbildung wirksam verhindern.

Biofilmentfernung

Selbst bestehende Biofilme können mit Instru Suc beseitigt werden: Für einen bestehenden Biofilm wurden nach 16 Stunden Einwirkzeit (über Nacht) mit einer 2%igen Gebrauchslösung keine Keime mehr nachgewiesen.

Nur für den professionellen Gebrauch.



Produktsortiment und Spezifikation

Artikelnr.	Gebindegr.	Gebindeart	Verpackungseinh.	PZN (Stück)	EAN/GTIN (Stück)	EAN/GTIN (Verpackungseinheit)
601489	2 L	Kanister	6 x 2 L	18313389	4260181252421	4260181252438
600047	5 L	Kanister	2 x 5 L	18313395	4260181250700	4260181251295

Instru Suc

Produktinformation

Medizinproduktklasse

IIb

Zusammensetzung

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:
7,5 g Dioctyldimethylammoniumchlorid

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit

36 Monate

Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

Einwirkzeiten

Instru Suc	Belastung		Norm	Konzentration	Einwirkz.
	hoch	niedrig			
Bakterizid	x		EN 13727 / VAH EN 14561 / VAH 15	2%	15 Min.
Levurozid	x		EN 13624 / VAH EN 14562 / VAH 15		

Informationen zu diesem Produkt



Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.drdeppe.de

Spezielle Anfragen richten Sie bitte an info@drdeppe.de

CE 0044



Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen
T +49 (0) 2152 5565-0 W www.drdeppe.de