

Product Description: **ALLEVYN Gentle Border** Component: **90x210 mm**
 IFU Germany (PIL) Dimensions:
 Product Code: **66800259** Colours: 
 Artwork Ref/BSC: **34823 / 10601713** Black
 Prev Artwork Ref/BSC: **24672 / 10601535**
 Date: **25 Aug 2022**
 Revision: **08** Created by: **TB**

ALLEVYN^o GENTLE BORDER



ALLEVYN^o GENTLE BORDER

Haftender hydrozellulärer Schaumverband mit Silikon-Beschichtung

Produktbeschreibung

ALLEVYN GENTLE BORDER Schaumverbände haben einen dreischichtigen Aufbau mit einem absorbierenden hydrozellulären Wundkissen, das zwischen einer perforierten Silikonkondensatkontaktschicht und einer atmungsaktiven, wasserdichten Außenfolie eingebettet ist.

Wirkungsweise

ALLEVYN GENTLE BORDER Schaumverbände ermöglichen ein hohes Flüssigkeitsmanagement und fördern ein feuchtes Wundheilungsmilieu, das für die Heilung optimal ist. Es hilft auch, das Mazerationsrisiko zu minimieren. Die perforierte Silikonkondensatkontaktschicht lässt Exsudat durch die Schaumstoffschicht dringen. Die Silikon-Klebeschicht ist sanft, geeignet für den Einsatz auf empfindlicher Haut und erleichtert das Anlegen, Repositionieren und Entfernen des Verbands. Die hydrozelluläre Schaumstoffschicht absorbiert Exsudat von der Wunde weg. Die atmungsaktive Außenfolie ermöglicht Verdunstung und hilft, eine Kontamination der Wunde mit Flüssigkeit und Bakterien zu verhindern, und ist duschfest.

Indikationen

1. Wundheilungsmanagement bei oberflächlichen, granulierenden Wunden, chronischen und akuten exsudierenden Wunden, mehr oder weniger tiefen Wunden. Dazu gehören:
 - Druckgeschwüre
 - Beingeschwüre
 - Diabetische Fußgeschwüre
 - Operationswunden
 - Verbrennungen ersten und zweiten Grades
 - Entnahmestellen
 - Hautrisse
 - Exulzierende Wunden
2. Prävention von Druckgeschwüren auf intakter Haut, u.a. Druckgeschwüre, die von Medizinprodukten verursacht werden, als Teil eines Präventionsplans für Druckgeschwüre.

Vorsicht: Wenn der Verband unter Medizinprodukten in der Nähe von Nase oder Mund angewendet wird, sollte Vorsicht geboten sein, da sich dort Feuchtigkeit bilden und somit das Haftvermögen beeinträchtigt werden kann, wodurch der Verband verrutschen könnte.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.allevyn.com

Vorsichtsmaßnahmen

- Wenn der Verband unter Medizinprodukten in der Nähe von Nase oder Mund angewendet wird, sollte Vorsicht geboten sein, da sich dort Feuchtigkeit bilden und somit das Haftvermögen beeinträchtigt werden kann, wodurch der Verband verrutschen könnte.
- Die Verwendung von ALLEVYN GENTLE BORDER Schaumverbände als Teil eines Prophylaxeprogramms gegen die Entwicklung eines Druckgeschwürs schließt nicht die Notwendigkeit aus, ein umfassendes Dekubituspräventionsprotokoll zu entwickeln und zu befolgen (z. B. regelmäßige Neupositionierung, geeignete Stützflächen, Hautpflege und häufige Hautuntersuchungen).
- Verwenden Sie diesen Verband nicht zum Befestigen anderer Medizinprodukte am Patienten, da der verwendete Haftstoff sehr sanft ist.
- Wenn Hautrötungen oder Zeichen einer Sensibilisierung auftreten, stellen Sie die Anwendung ein und konsultieren Sie das medizinische Fachpersonal.
- Das Durchschneiden des Verbands beeinträchtigt die Bakterienbarriere und die duschfesten Eigenschaften des Verbands.
- Tauchen Sie den Verband nicht in Wasser.
- Nicht mit Oxidationsmitteln wie Hypochloritlösungen (z. B. EUSOL) oder Wasserstoffperoxid verwenden, da diese die Saugfähigkeit des Verbands verringern können.
- Nur zur einmaligen Verwendung, bei Verwendung an mehr als einem Patienten kann es zu Kreuzkontaminationen oder Infektionen kommen.
- Bewahren Sie unbenutzte Verbände nach dem Öffnen nicht für eine spätere Anwendung auf.

• Bei Verwendung auf infizierten Wunden sollte die Infektion gemäß dem lokalen klinischen Protokoll behandelt werden.

ALLEVYN GENTLE BORDER Schaumverbände sind für medizinisches Fachpersonal oder zur Verwendung durch Patienten unter Anleitung eines medizinischen Fachpersonals bestimmt.

Wie in dieser Packungsbeilage beschrieben, sollte medizinisches Fachpersonal die Patienten bei Bedarf angemessen darüber beraten, wie der Verband angelegt, überwacht, entfernt und entsorgt wird und wann ein medizinisches Fachpersonal zu kontaktieren ist.

Gebrauchsanweisung

1. Die Applikationsstelle reinigen. Darauf achten, dass die umliegende Haut sauber und trocken ist und nicht übermäßig viele Haare aufweist.
2. Geeignete Verbandsgröße auswählen. Sicherstellen, dass das absorbierende Kissen die gesamte Wunde oder zu schützenden Fläche bedeckt. Die Skala auf dem Beutel dient nur als Orientierungshilfe. Vermeiden Sie den Kontakt des Beutels mit der Wunde.
3. Die erste Schutzfolie entfernen und die haftende Seite des Verbands auf der Haut befestigen. Bei Anwendung des Sakralverbands das schmale Ende mindestens 2 cm über dem Analsphinkter platzieren, dann den Verband über dem Sacrum glattstreichen.
4. Restliche Schutzfolie(n) entfernen. Verband glatt streichen. Bei Anwendung auf einer Wunde sicherstellen, dass das absorbierende Kissen die Wunde abdeckt.
5. Haftträger glatt streichen. Sicherstellen, dass keine Falten entstehen, die die Abdichtung beeinträchtigen könnten. Bei Bedarf kann der Verband neu platziert werden.
6. ALLEVYN GENTLE BORDER Schaumverbände können speziell zugeschnitten werden, um Wunden an Ferse, Ellbogen und anderen schwer zugänglichen Körperstellen zu applizieren. Wenden Sie beim Schneiden des Verbands immer eine saubere Technik an. Das Durchschneiden des Verbands beeinträchtigt die Bakterienbarriere und die duschfesten Eigenschaften des Verbands. Stellen Sie sicher, dass alle exponierten Schaumbereiche mit einem geeigneten Folienverband bedeckt sind, wobei darauf zu achten ist, dass nicht der gesamte Verband bedeckt wird.

Weitere Anleitungen zur Anwendung von Ferse und Sacrum finden sie in den Darstellungen auf dem Beutel oder Karton des Verbands.

Bei nekrotischen oder schorfigen Wunden können ALLEVYN GENTLE BORDER Schaumverbände in Verbindung mit INTRASITE^o GEL Hydrogel-Wundverbänden verwendet werden.

Beobachtung bei Verwendung für Prävention von Druckgeschwüren: die Haut häufig auf Druckstellen untersuchen. Dazu eine Ecke aufdecken, untersuchen und dann den Verband neu platzieren.

Entfernung: Eine Ecke anheben und langsam vollständig abziehen.

Entsorgen Sie ALLEVYN GENTLE BORDER Schaumverbände gemäß den örtlichen klinischen Protokollen oder entsorgen Sie sie nach Gebrauch hygienisch.

Häufigkeit des Verbandwechsels

In den frühen Phasen der Behandlung sollten die ALLEVYN GENTLE BORDER Schaumverbände häufig kontrolliert werden. ALLEVYN GENTLE BORDER Schaumverbände können bis zu 7 Tage belassen werden, mit Ausnahme des Sacralbereich, wo Verbände bis zu 5 Tage belassen werden können. ALLEVYN GENTLE BORDER Schaumverbände sollten je nach Zustand der Wunde und der umliegenden Haut bzw. sobald das Exsudat sichtbar wird und sich auf weniger als 0,5 cm an den Rand des Wundkissens annähert gewechselt werden (je nachdem, was zuerst eintritt). Die Entscheidung zum Verbandwechsel sollte anhand der klinischen Beurteilung und der lokalen Protokolle unter Anleitung von medizinischem Fachpersonal erfolgen. Wenn Ihrer Meinung nach während der Verwendung des Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde. Complaints@Smith-Nephew.com

ALLEVYN^o GENTLE BORDER



Smith+Nephew

Handelsformen

Best.-Nr.	Abmessung	Stck./Pkg.
66800259	7.5cm x 7.5cm	5
66800260	10cm x 10cm	5
66800901	10cm x 20cm	5
66800262	12.5cm x 12.5cm	5
66800263	17.5cm x 17.5cm	5
66800899	Sakralverband 16.8cm x 17.1cm	5
66800960	Multisite 17.1cm x 17.9cm	5

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England.

Marken von Smith & Nephew ©Smith & Nephew

Smith & Nephew GmbH, Friesenweg 30, 22763 Hamburg.

Tel: +49 (0)40 87 97 44 0. Ausgabedatum 06/2022. Änderung 01.

Smith & Nephew Operations B.V. Bloemlaan 2, 2132 NP Hoofddorp, Netherlands

STERILE Einfach-Sterilbarriersystem. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.

MD **UDI** Medizinprodukt Produktidentifizierungsnummer **Grüner Punkt** **Europäischer Importeur**

10601713 34823