

Mepi™ Press 2

Ein Mehrkomponenten-Kompressionssystem
zur Verwendung bei venösen Beingeschwüren



Mepi™ Press 2

Mepi™ Press 2 ist ein unsteriles Mehrkomponenten-Kompressionssystem für den Einmalgebrauch. Es ist für die Langzeitbehandlung in der Kompressionstherapie von chronischen venösen Erkrankungen indiziert, die eine Kompression erfordern (ABPI 0,8–1,3). Das System besteht aus einer weißen Polsterbinde (1. Lage) und einem braunen Kompressionsverband (2. Lage). Durch das Anlegen der beiden Verbände in Lagen entsteht ein Kompressionssystem, das bis zu 7 Tage getragen werden kann.

Die weiße Polsterbinde besteht aus Polyester und Elasthan und ist einseitig kohäsiv beschichtet. Der braune Kompressionsverband besteht aus Polypropylen und Elasthan und ist beidseitig kohäsiv beschichtet. Auf dem Kompressionsverband ist ein Indikator aufgedruckt, der das korrekte Anlegen erleichtert.

Das System bietet einen durchschnittlichen Kompressionsdruck (Rückenlage oder Ruhezustand) von bis zu 40 mmHg.

Vorteile

- Ein Indikator in der äußeren Schicht und eine Dehnungsbegrenzung in der ersten Schicht helfen beim korrekten Anlegen¹
- Optimale Druckverteilung¹
- Beide Lagen lassen sich beim Anlegen leicht abreißen¹ (keine Schere erforderlich)
- Keine zusätzliche Fixierung erforderlich¹
- Rutschfest¹
- Hautfreundlich¹
- Tragekomfort mit den meisten Schuhen¹
- Kann bis zu 7 Tage getragen werden²

Empfohlene Methode zum Anlegen



1. Messen Sie den Knöchel des Patienten. Stellen Sie sicher, dass der Fuß des Patienten sich beim Anlegen stets in einem 90°-Winkel zum Unterschenkel befindet. Mepi™ Press 2 ist für einen Knöchelumfang von 18–32 cm indiziert.



2. Legen Sie die **weiße Polsterbinde** am Fuß an. Dehnen Sie den Verband nicht. Sobald er oberhalb des Knöchels liegt, wickeln Sie den Verband bei voller Dehnung spiralförmig mit einer 50%igen Überlappung um das Bein. Reißen Sie überschüssiges Material etwa 2 cm unterhalb des Fibulaköpfchens ab.



3. Legen Sie den **braunen Kompressionsverband** auf die gleiche Weise wie die Polsterbinde am Fuß an. Sobald er sich über dem Knöchel befindet, wickeln Sie den Verband spiralförmig mit einer 50%igen Überlappung der Lagen um das Bein. Um den optimalen Druck zu erzielen, dehnen Sie den Verband, bis der aufgedruckte Indikator ein regulär geformtes Quadrat bildet. Reißen Sie den Überschuss ab und drücken Sie den Verband über die Beinlänge an.



Die Applikationstechnik zum Anlegen des Verbands muss möglicherweise angepasst werden, um die anatomischen oder pathophysiologischen Eigenschaften des Patienten und/oder die ärztliche Verordnung zu berücksichtigen.

Indikationen

Chronische Venenerkrankungen

- Prävention und Behandlung von venösen Ödemen
- Prävention und Behandlung von venösen Hautveränderungen
- Ekzeme und Pigmentierung
- Lipodermatosklerose und Atrophie blanche
- Behandlung von venösen Beingeschwüren
- Prävention von wiederkehrend venösen Beingeschwüren
- Krampfadern
- Anfangsphase nach der Behandlung von Krampfadern
- Funktionelle venöse Insuffizienz (in Verbindung mit Adipositas, Arbeiten im Sitzen oder Stehen)
- Venöse Malformationen

Thromboembolische Venenerkrankungen

- Oberflächliche Venenthrombose
- Tiefe Venenthrombose der Arme und Beine
- Postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten

Ödem

- Lymphödeme
- Ödeme während der Schwangerschaft
- Posttraumatische Ödeme
- Postoperative Ödeme
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Idiopathische zyklische Ödeme
- Lipoödeme ab Stadium II
- Kongestive Zustände infolge von Immobilität (arthrogenes kongestives Syndrom, Parese und partielle Parese der Extremitäten)
- Medikamenteninduziertes Ödem, falls ein Wechsel nicht möglich ist

Sonstige Indikationen

- Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz
- Entzündliche Dermatoase der Beine
- Kongestive Erkrankungen in der Schwangerschaft

Vorsichtsmaßnahmen

- Vor Beginn der Behandlung mit Mepi™ Press 2 sollte eine Doppler-Untersuchung zur Bestimmung des ABPI durchgeführt werden.
- Vor dem Anlegen von Mepi™ Press 2 muss die Wunde gereinigt und mit einem geeigneten Wundauflage versorgt werden.
- Achten Sie beim Anlegen von Mepi™ Press 2 darauf, dass die Verbände gleichmäßig gedehnt werden und parallel verlaufen, um eine gleichmäßige Druckverteilung zu erzielen und Verengungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Zehen nach dem Anlegen des Verbands gut durchblutet sind. Treten während der Behandlung Schmerzen oder Komplikationen wie anhaltende Verfärbungen (blaue oder weiße Zehen) auf, muss der Verband sofort entfernt und der behandelnde Arzt informiert werden.
- Verbände können Trockenheit und Juckreiz der Haut verursachen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Patienten und/oder Anwendern mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen die Materialien/ Bestandteile des Produkts.
- Nicht wiederverwenden. Bei Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigt werden und es kann zu Kreuzkontaminationen kommen.

Mepi™ Press 2 Sortiment Home Care & Klinik

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung
30 00 01	1. Schicht: 6,5 m x 10 cm (gedehnt)	Weiß	18 x 32 cm	19 51 18 26	1 Set
	2. Schicht: 8,2 m x 10 cm (gedehnt)	Braun			
30 00 06	1. Schicht: 6,5 m x 10 cm (gedehnt)	Weiß	18 x 32 cm	19 51 18 55	6 Sets
	2. Schicht: 8,2 m x 10 cm (gedehnt)	Braun			

Referenzen: 1. Gebrauchstauglichkeitsbericht (KOB) 2. Klinischer Bewertungsbericht (KOB)

Weitere Informationen finden Sie unter www.molnlycke.de

Molnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel. +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170, info.de@molnlycke.com
Die Namen Molnlycke Health Care und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Molnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2024 Molnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten. DWCO242
ML_1616_0



QR-Code scannen
und mehr erfahren.
www.molnlycke.de/produkte-lösungen/mepi-press-2/

