

Prontosan® Wound Spray

Reinigung und Befeuchtung von oberflächlichen
Wunden und Verbrennungen



B. Braun WoundCare

NEU!

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Prontosan® Wound Spray

Reinigung und Befeuchtung von oberflächlichen Wunden und Verbrennungen

Beugt Wundinfektionen vor

Fördert die Wundheilung

Gutes kosmetisches Ergebnis

Lindert den Schmerz

Schützt vor multiresistenten Erregern (MRSA, VRE, ESBL)

Beugt der Bildung von Biofilm vor

Schmerzlos anwendbar

Gute Hautverträglichkeit

Gute Verträglichkeit mit Katheter- und Sondenmaterialien

Voraussetzung für eine gute Wundheilung ist die Sauberkeit der Wundoberfläche und des Wundrandes. Dies wird unterstützt durch eine effektive und gleichzeitig schonende Behandlung mit Prontosan® Wound Spray.

Einsatzgebiete

- › Akute und chronische oberflächliche Wunden
- › Riss-, Schnitt-, Schürf- und Bisswunden
- › Leichte Verbrennungen/Verbrühungen
- › Reinigung der Eintrittspforten von PEG-/PEJ-Sonden und suprapubischen Kathetern
- › Reinigung peristomaler Hautareale
- › Atraumatisches Lösen von verkrusteten Wundverbänden

Produkt	Inhalt	VE	PZN	REF
Prontosan® Wound Spray	75 ml	20 Stück	9447292	400565

Zusammensetzung: Gereinigtes Wasser, Betain-Tensid, 0,1 % Polyaminopropyl Biguanid (Polihexanid).

POLIHEXANID IST MITTEL DER 1. WAHL

„Auf Grund der guten Gewebeerträglichkeit ... und der klinisch offensichtlichen Wundheilungsförderung ist Polihexanid als Mittel der 1. Wahl für schlecht heilende chronische bzw. für sehr empfindliche Wunden (z. B. Verbrennungswunden 2. Grades) sowie für Lavagen einzuordnen.“

Quelle: Konsensempfehlung zur Wundantiseptik, Expertengruppe, April 2004

Anwendung

Prontosan® Wound Spray großzügig über die Wundfläche und den Wundrand sprühen, herunterlaufende Lösung mit einer sterilen Komresse abtupfen. Anschließend mit einem Wundverband abdecken.

Verklebte und anhaftende Wundauflagen können mit Prontosan® Wound Spray befeuchtet und dadurch einfach und schmerzarm entfernt werden.

Vor der Anwendung von Prontosan® Wound Spray Reste von Salben, Cremes und anderen Wundtherapeutika entfernen.

Nach Anbruch 12 Monate haltbar.

