



## sensitiv Wundspüllösung


Vertrieb durch:



# Hypertone, basische Meersalzlösung mit aktivem Sauerstoff

- Enthält NaCl 1,2% (Sal Maris), NaOCl 0,04%

- Die natürlichen Komplexverbindungen der Meersalzspurenelemente wirken antientzündlich und beeinflussen Zellmilieu und Wundstoffwechsel positiv. Der erhöhte Salzgehalt unterstützt die Ausschwemmung von Wundödemen und reduziert so Wundschmerz.

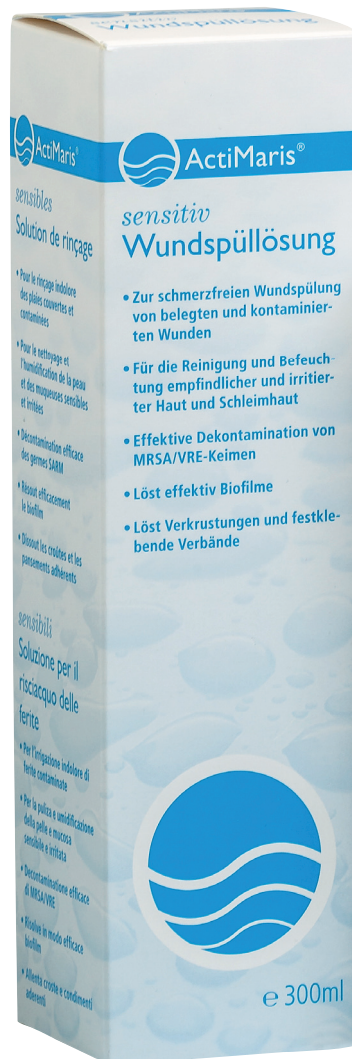

- Aktiver Sauerstoff neutralisiert schnell und langanhaltend Gerüche und wirkt eliminierend auf wundtypische Erreger.
- Der basische pH-Wert unterstützt die kontrollierte Freisetzung des aktiven Sauerstoffs.

ActiMaris AG



simple medical solutions

## So funktioniert ActiMaris *sensitiv*

ActiMaris *sensitiv* ist eine gut verträgliche Wundspüllösung, die die Wunde effektiv reinigt, Entzündungen reduziert, abschwellend wirkt und für eine schnelle und langanhaltende Geruchsreduktion sorgt. Diese Nutzen resultieren aus dem optimalen Zusammenspiel von aktivem Sauerstoff, ionisiertem Meerwasser und basischem pH-Wert. Die Spurenelemente der Wundspüllösung liegen in ihren natürlichen, physiologischen Komplexverbindungen vor und beeinflussen so Zellmilieu und Wundstoffwechsel positiv. ActiMaris *sensitiv* ist auch für empfindliche, irritierte und entzündete Haut und Schleimhaut geeignet.

### Vorteile von ActiMaris *sensitiv*

ActiMaris *sensitiv* ist die optimale Lösung für Anwender und Patienten, die die Wunde natürlich und sanft, aber auch effektiv reinigen möchten.

#### Aktive, schnelle und langanhaltende Geruchsreduktion

Wird ActiMaris *sensitiv* auf einer Wunde angewendet, reagiert der aktive Sauerstoff mit den Geruchsmolekülen und neutralisiert diese sofort und langanhaltend. Aktiver Sauerstoff wirkt zudem eliminierend auf wundtypische Erreger.

#### Entzündungsminderung

Dank der Spurenelemente, die in ihren natürlichen Komplexverbindungen und in physiologisch richtiger Konzentration vorliegen, wirkt ActiMaris *sensitiv* anti-entzündlich.

#### Abschwellende Eigenschaften

Der Rückgang von Entzündungen und der aktive Sauerstoff begünstigen abschwellungsfördernde Prozesse. Der erhöhte Salzgehalt von 1,2% unterstützt die Ausschwemmung von Wundödemen und reduziert den Wundschmerz.

#### Tiefenwirkung

Die H<sub>2</sub>O-Moleküle in ionisiertem Meerwasser sind klein und können so tief ins Gewebe eindringen und dort ihre Wirkung optimal entfalten.

#### Lange Verwendungsdauer

ActiMaris *sensitiv* kann nach dem Öffnen 3 Monate verwendet und bei Zimmertemperatur gelagert werden – und dies ohne den Zusatz künstlicher Konservierungsmittel. Damit ist ActiMaris *sensitiv* anwenderfreundlich und wirtschaftlich.

### Anwendungshinweise

ActiMaris *sensitiv* kann zimmerwarm angewendet werden. Bei Wunden mit erhöhter Schmerzneigung kann die Wundspüllösung unmittelbar vor der Anwendung auf Körpertemperatur erwärmt werden. Die Dauer und Frequenz der Anwendung ist an die individuellen Wundverhältnisse anzupassen und sollte so lange durchgeführt werden, bis sich alle Beläge und Nekrosen leicht entfernen lassen und die Wunde optisch sauber ist. Wundabhängig kann ein Verbandwechsel bei nicht infizierten Wunden indikations- und phasengerecht alle 2 bis 3 Tage erfolgen.

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com).

Mölnlycke Health Care GmbH  
Telefon 0211 92088-0 · Telefax 0211 92088-170

Die Anwendung kann in Form der klassischen Nass-/Trockenphase erfolgen. Dabei ist die Dauer der Nassphase an Dicke und Festigkeit der Fibrinbeläge, die mikrobielle Besiedelung, das Ausmaß von Wundrandmazeration und Irritationen anzupassen:

- Stabile Wundumgebung, sauberer Wundgrund ohne mikrobielle Auffälligkeit: 5-10 Minuten
- Fibrinbelag, ohne mikrobielle Auffälligkeit, bei Wundrandmazeration/Irritation: 15 Minuten
- Fibrinbelag, übel riechende, stark von Keimen besiedelte Wunden: 20 Minuten

Decken Sie die Wunde anschließend mit einem adäquaten Primär- oder Sekundärverband ab. ActiMaris *sensitiv* ist zur Lang- und Kurzzeitanwendung auch bei empfindlicher/irritierter Haut und Schleimhaut geeignet. Die Wundspüllösung wird dermatologisch als unbedenklich bewertet. Die Anwendung ist schmerzarm und wird im Allgemeinen auch von Allergikern gut vertragen.

### Anwendungsgebiete

ActiMaris *sensitiv* dient der Reinigung, Spülung, Befeuchtung und Dekontamination von

- akuten, chronischen, thermischen und chemischen Wunden
- Eintrittspforten urologischer Katheter, PEG-Sonden und Drainagen

Zudem kann ActiMaris *sensitiv* zur intraoperativen Reinigung und Spülung von Wunden, zum Lösen verkrusteter Wundverbände sowie zur Befeuchtung von inaktiven Verbänden angewendet werden.

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

### ActiMaris Wundspüllösung *sensitiv*

Artikelnr.	Inhalt	PZN/ Packung	Stck./ Packung	Stck./ Versandkarton
30 300	300 ml	10 25 90 29	1	30
31 000	1.000 ml	10 25 90 41	1	8

ActiMaris AG



simple medical solutions

ActiMaris AG, Technikumstrasse 14,  
CH-9470 Buchs SG, Switzerland  
[www.actimaris.com](http://www.actimaris.com)  
Telefon: 0041 71 5057525  
Fax: 0041 71 5057524

