

INSTRU PLUS

Flüssigreiniger für Instrumente und Endoskope

- besonders materialschonend - auch für Endoskope
- Zusatzreiniger für die Instrumentendesinfektion
- mit allen Instrumentendesinfektionsmitteln kombinierbar

PENTAX - gelistet

- ✓ pH-neutral
- ✓ phosphatfrei



CE

PRÄPARATETYP

INSTRU PLUS ist ein pH-neutraler Zusatzreiniger für Instrumentendesinfektionsmittel zur selbsttätigen und gründlichen Schnellreinigung von Instrumenten und Endoskopen sowie Geräten aus Metall, Kunststoff, Keramik, Glas, Gummi und Porzellan.

INSTRU PLUS zeichnet sich durch einen guten Korrosionsschutz und eine hervorragende Materialverträglichkeit aus. **INSTRU PLUS** ist der ideale Reinigungsverstärker für Instrumentendesinfektionsmittel wie **PERFEKTAN TB**, **PERFEKTAN ENDO**, **DESCOTON FORTE**, **PERFEKTAN NEU** und **DESCOTON EXTRA**. Als pH-neutraler Flüssigreiniger ist **INSTRU PLUS** gem. der RKI-Empfehlung zur Endoskopaufbereitung besonders zur materialschonenden Reinigung englumiger Instrumente wie z.B. Endoskope geeignet. Zur Anwendung im Ultraschallbad geeignet!

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Anwendungsbereiche von **INSTRU PLUS** umfassen chirurgisches und zahnärztliches Instrumentarium, Glasventile, Gummihandschuhe, Gummischürzen, Inhalierapparate, Kunststoffmaterialien, Laborgläser, Mörser, Nierenschalen, Pinzetten, Porzellan, Scheren, Schläuche, Standflaschen, Waschschüsseln, Zählkammern, Zangen sowie starre und flexible Endoskope.

ANWENDUNG

Zu reinigendes Material sofort nach Gebrauch in die **INSTRU PLUS**-Lösung einlegen und 15-60 Minuten einwirken lassen. Das Reinigungsgut muß vollständig benetzt sein. Bei hartnäckiger Verschmutzung die Dosis und/oder die Einwirkzeit erhöhen.

Die Lösung wird je nach Grad der Verschmutzung erneuert. Die Instrumente sind nach der Badentnahme gründlich mit Wasser abzuspülen. **INSTRU PLUS** eignet sich besonders als Reinigungsverstärker für Instrumentendesinfektionsmittel. Die Standzeiten für **DESCOTON FORTE**, **PERFEKTAN NEU**, **DESCOTON EXTRA**, **PERFEKTAN TB** und **PERFEKTAN ENDO** werden nicht beeinflusst.

DOSIERUNG

je nach Verschmutzung 1 - 5 % 15-60 Min.
(entspricht 40-200 ml auf 4 Liter-Desinfektionswanne)

in Kombination mit **DESCOTON FORTE**, **DESCOTON EXTRA**, **PERFEKTAN TB**, **PERFEKTAN NEU** und **PERFEKTAN ENDO**.

Zur Grundreinigung englumiger Instrumente (z.B. Endoskope): 2 - 5 % 15 Min.
(Konzentration bei starker Verschmutzung erhöhen)

ZUSAMMENSETZUNG

Inhaltsstoffe unter Berücksichtigung der Detergentienverordnung: Nichtionische Tenside (5-15%), Lösungsvermittler, Korrosionsinhibitoren, Konservierungsstoffe (Benzalkonium Chloride)

Die im Produkt enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar gem. Detergentienverordnung.

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

pH-Wert, Konzentrat: 7,0 + / - 1,0
Dichte, 20°C: 1,000 + / - 0,010

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufeinheit	PZN	Art.-Nr.
2 L Flasche	6 x 2 L	-	00-104-020
5 L Kanister	3 x 5 L	-	00-104-050

DOSIERHILFEN

Dosierflasche, Dosierpumpe für 2-Liter-Flasche und 5 Liter-Kanister, Kanisterumfüllhahn, Kanisterschlüssel, Dosierautomaten.





INSTRU PLUS

Desinfektionsmittel für Instrumente und Endoskope

BESONDERE HINWEISE

Gefahr ernster Augenschäden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise gereinigt und beseitigt werden. Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.

Bei nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln ist das Tragen von Schutzhandschuhen von den Berufsgenossenschaften vorgeschrieben.

Durch die zusätzliche Verwendung von **INSTRU PLUS** besteht keine Beeinträchtigung der Standzeit von unseren Instrumentendesinfektionsmitteln.

REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

