



SPEZIAL ÖLSPRAY

✓ FCKW-frei

Pflegespray für medizinische Instrumente

- auf der Basis medizinischer Weißöle
- zur Instrumentenpflege vor der Dampfsterilisation
- optimale Schmierung beweglicher Teile



PRÄPARATETYP

SPEZIAL ÖLSPRAY ist ein Pflegespray für medizinische Instrumente, insbesondere für Gelenkinstrumente. Im Rahmen der ordnungsgemäßen Aufbereitung. Bei starren Endoskopen zur Pflege der Gelenke sowie von nicht wartungsfreien Hähnen. Das spezielle Sprühventil sorgt für einen feinen, gleichmäßigen Schutzfilm, der eine Sterilisation medizinischer Instrumente nicht beeinträchtigt. Medizinisches Instrumentarium kann anschließend der Dampfsterilisation zugeführt werden.

Die Dampfdurchlässigkeit von **SPEZIAL ÖLSPRAY** erlaubt eine sichere und effektive Sterilisation im Dampfsterilisateur.

SPEZIAL ÖLSPRAY erhöht die Werterhaltung der Materialien durch eine optimale Schmierung beweglicher Teile und einen wirksamen Korrosionsschutz. Aufgrund der Verwendung reiner medizinischer Weißöle ist **SPEZIAL ÖLSPRAY** äußerst materialverträglich und toxikologisch unbedenklich nach Arznei- und Lebensmittelrecht .

ANWENDUNGSBEREICHE

Zur Pflege von Medienprodukten im Rahmen Ihrer Aufbereitung:

- medizinischen Instrumenten (z.B. vor der Dampfsterilisation)
- Luft- oder kugelgelagerte Turbinen
- Scharniere, Hand- und Winkelstücken
- Gelenke und nicht wartungsfreie Hähne von starren Endoskopen

Optimale Schmierung beweglicher Teile. Durch gleichmäßige Filmbildung auf den Stahloberflächen wird ein wirksamer Korrosionsschutz gewährleistet.

ANWENDUNG

Instrumente:

Gelenke/Scharniere im halb geöffneten Zustand aus ca. 25 cm Entfernung einsprühen. Anschließend ggf. sterilisieren.

Achtung: Nicht zu viel Öl aufsprühen, um die Sterilisation nicht zu behindern. Es darf nur ein dünner Ölfilm verbleiben.

Turbinen, Scharniere oder Hand- und Winkelstücke:

Zweimal täglich, bzw. vor jedem Autoklavieren/ Sterilisieren ca. 1 Sek. durchsprühen. Beim Sprühen Dose senkrecht halten. Vor Gebrauch schütteln.

Geeignet zur Dampfsterilisation [hier hatten bereits in unserer Begutachtung vom 21.07.2014 (Seite 2) dargelegt, dass eine Eignung zur Heißluftsterilisation nicht gegeben ist, wenn die entsprechende Temperatur nur bis maximal 180° Celsius sein soll. Insoweit ist hier entweder dieser Passus komplett zu streichen oder aber der Temperaturbereich auf maximal 240° Celsius zu erhöhen.]

ZUSAMMENSETZUNG

Medizinisches Weißöl nach DAB 10
Treibgas Propan/ Butan (FCKW-frei)

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
500 ml Spraydose	12 x 500 ml	-	00-108-005

BESONDERE HINWEISE

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Hochentzündlich. Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

SPEZIAL ÖLSPRAY kann bei Latex- und Gummiteilen Quellung verursachen; in solchen Fällen **SILIKONSPRAY** verwenden.

Nicht als Gleitmittel für flexible Endoskope verwenden.

PRODUKTSTATUS

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

