




## Dismoclean® 25 acid

Flüssiges Neutralisationsmittel für den Einsatz in Spezialspülmaschinen.

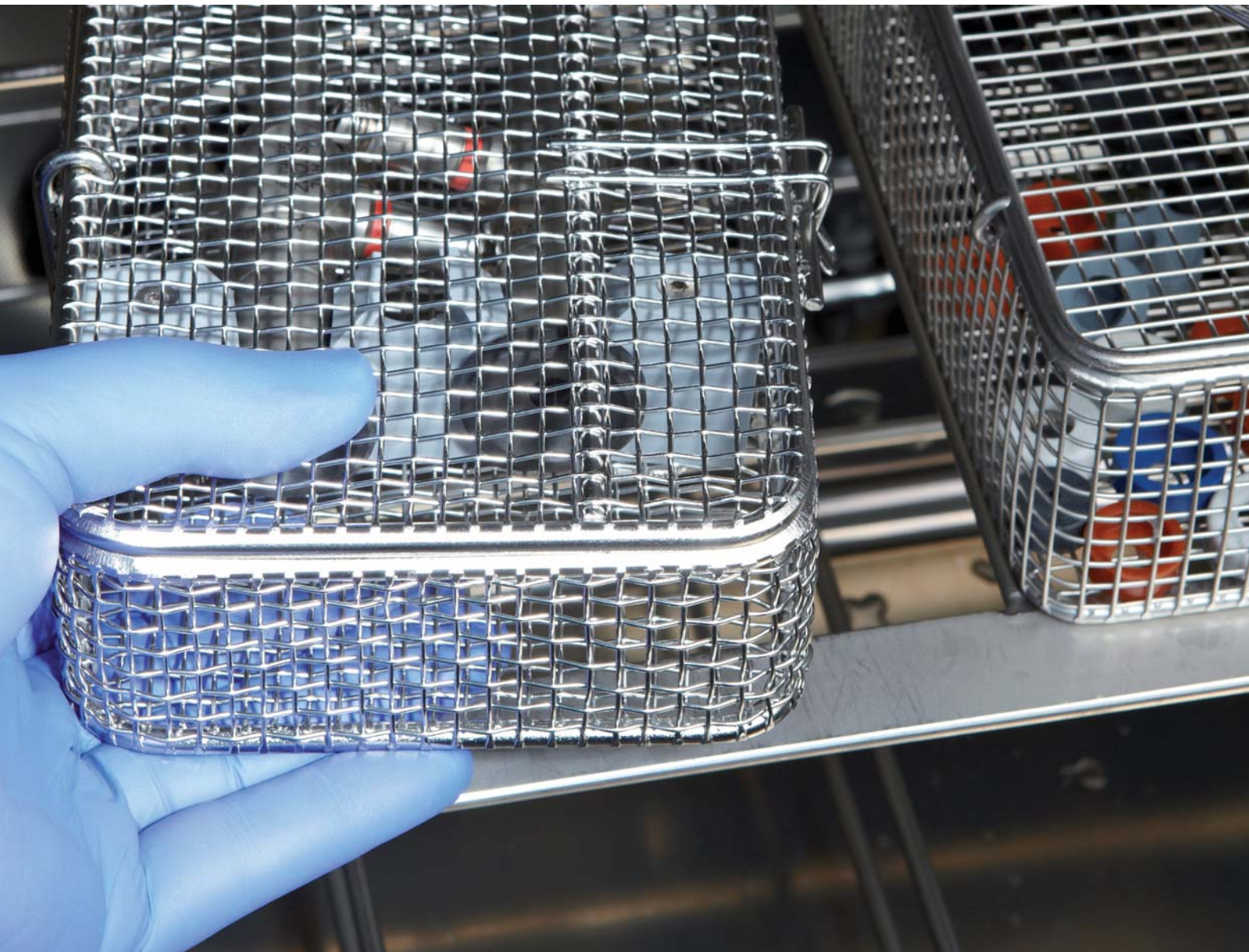

Mit umfassenden Wirksamkeitsnachweisen und einer wissenschaftsbasierten Forschung und Entwicklung gewährleisten wir bei unseren Produkten zur Hygiene und Desinfektion einen bestmöglichen Qualitätsstandard.  
**Wir forschen für den Infektionsschutz.**





hilft heilen.

PAUL HARTMANN AG  
89522 Heidenheim  
Deutschland

## Charakteristik

- materialschonend für Instrumente und Maschine
- beugt Rückstandsbildung vor
- phosphat- und tensidfrei
- auf Basis von Zitronensäure

Dismoclean® 25 acid dient der Neutralisation verschleppter Alkalireste aus dem Hauptspülgang.

## Zusammensetzung

Organische Säure.

## Dosierung

Die Dosierung hängt im wesentlichen von der Stärke der Alkalität der verschleppten Lauge ab. Im allgemeinen genügt eine Konzentration von 0,1 - 0,3 % Spüllösung. Die Zugabe erfolgt normalerweise automatisch über die Dosierpumpe.



## Anwendung

Dismoclean 25 acid wurde speziell für den Einsatz in Spezialspülmaschinen entwickelt. Es dient primär der Neutralisation verschleppter Alkalireste aus dem Hauptspülgang. Dismoclean 25 acid ist deshalb im Zusammenhang mit alkalischen Spülmitteln geeignet und dort, wo es auf völlige Phosphat- bzw. Tensidfreiheit ankommt.

## Anwendungsgebiete

- OP-Bereich
- Anästhesie
- Intensiv
- Mikrobiologie
- Labor

Zusätzlich ist dieses Neutralisationsmittel, in Verbindung mit Dismoclean 23 alka zyme und Dismoclean 24 vario bestens geeignet, sofern es die Wasserqualitäten erforderlich machen.

## Listung

CE-Kennzeichnung gemäß Medizinproduktegesetz (MPG).

### Chemisch physikalische Daten

Aussehen	klare, farblose Flüssigkeit
pH-Wert Konzentrat:	ca. 1
pH-Wert 1 %ige Lösung (VE-Wasser)	ca. 3
Dichte (20 °C)	ca. 1,17 g/cm <sup>3</sup>

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG: Xi Reizend. Reizt die Augen. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind daher die Grundmaßnahmen zum Schutz der Beschäftigten entsprechend der Schutzstufe 2 § 9 GefStoffV zu beachten. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>Dismoclean® 25 acid</b>				
Kanister	5 kg	910 890	06879950	1
Kanister	10 kg	910 880	06879967	1
Kanister	25 kg	910 870	06879973	1

Wir forschen für den Infektionsschutz. [www.bode-science-center.de](http://www.bode-science-center.de).

