




Dismoclean® 26 acid

Flüssiges Vorspül- und Neutralisationsmittel
für den Einsatz in Spezialspülmaschinen.

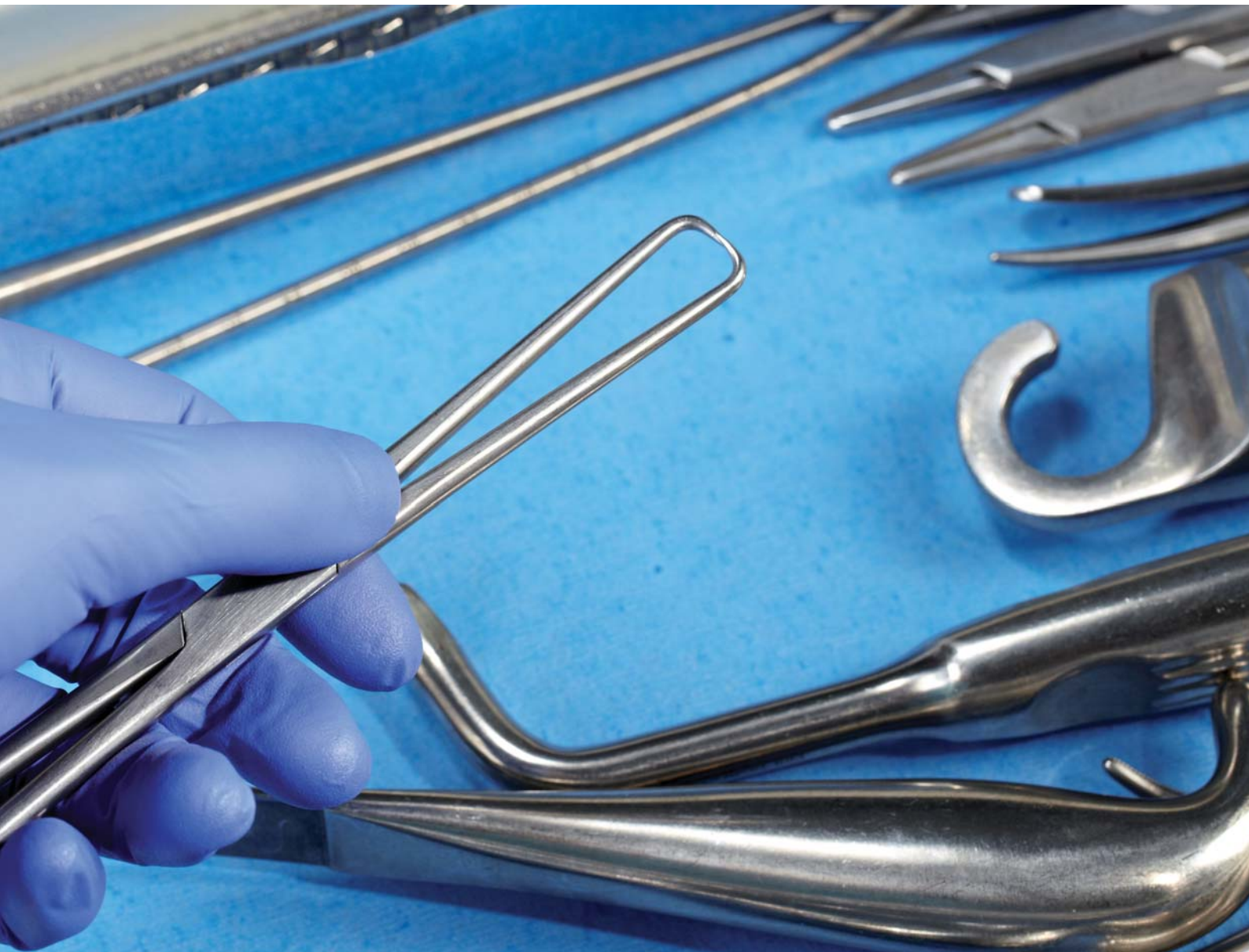

Mit umfassenden Wirksamkeitsnachweisen und einer wissenschaftsbasierten Forschung und Entwicklung gewährleisten wir bei unseren Produkten zur Hygiene und Desinfektion einen bestmöglichen Qualitätsstandard.
Wir forschen für den Infektionsschutz.





HARTMANN



hilft heilen.

PAUL HARTMANN AG
89522 Heidenheim
Deutschland

Charakteristik

- auf Basis von Phosphorsäure und Komplexbildnern
- beseitigt Kalkablagerungen

Dismoclean 26 acid dient als Vorspülmittel bei hartnäckigen, alkalisch nicht löslichen Schmutzablagerungen wie auch als Neutralisationsmittel nach einer alkalischen Reinigung von chirurgischen Instrumenten.

Zusammensetzung

Phosphorsäure.

Dosierung

0,1 – 0,3 %

Anwendung

1. Vorspülmittel

Dismoclean 26 acid wird bei Schmutzablagerungen, welche durch eine alkalische Reinigung nicht beseitigt werden können, als Vorwaschmittel eingesetzt. Es vermag Eiweißstoffe, organische Basen, Carbonate und Hydroxide gut anzulösen, so dass die anschließende alkalische Reinigung erleichtert wird. Dismoclean 26 acid beseitigt eventuelle Kalkablagerungen in der Spülmaschine.

2. Neutralisationsmittel

Dismoclean 26 acid sollte immer nach einer hochalkalischen Reinigung und immer dann, wenn chirurgische Instrumente aufbereitet werden, zum Einsatz gelangen. Dadurch erfolgt eine Neutralisation, die der Werterhaltung der Instrumente dient.

Anwendungsgebiete

Instrumentenaufbereitung

- OP-Bereich
- Anästhesie
- Intensiv
- Mikrobiologie
- Labor



Listung

CE-Kennzeichnung gemäß Medizinproduktegesetz (MPG).

Chemisch physikalische Daten

Aussehen	klare, farblose Flüssigkeit
pH-Wert Konzentrat	ca. < 1
pH-Wert 1 %ige Lösung (VE-Wasser)	ca. 2
Dichte (20 °C)	ca. 1,42 g/cm ³

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG: C. Ätzend. Enthält: Polyphosphorsäure. Verursacht Verätzungen. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind daher die Grundmaßnahmen zum Schutz der Beschäftigten entsprechend der Schutzstufe 2 § 9 GefStoffV zu beachten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Dismoclean® 26 acid				
Kanister	7 kg	910 990	06879996	1
Kanister	12 kg	910 980	06880002	1
Kanister	35 kg	910 970	06880019	1

Wir forschen für den Infektionsschutz. www.bode-science-center.de.



BODE SCIENCE CENTER • Melanchthonstr. 27 • 22525 Hamburg • Tel. +49 40 54006-111 • Fax -777
www.bode-science-center.de • contact@bode-science-center.com