



Dismoclean® 41 STS

Spezialpräparat zum Einsatz in thermischen Steckbeckenautomaten.



Mit umfassenden Wirksamkeitsnachweisen und einer wissenschaftsbasierten Forschung und Entwicklung gewährleisten wir bei unseren Produkten zur Hygiene und Desinfektion einen bestmöglichen Qualitätsstandard.
Wir forschen für den Infektionsschutz.





hilft heilen.

PAUL HARTMANN AG
89522 Heidenheim
Deutschland

Charakteristik

- Schutz vor Verkalkung der Maschine und des Dampferzeugers
- gute Reinigungsleistung
- fleckenfreie Trocknung
- hohes Kalkbindungsvermögen
- hohe Materialverträglichkeit
- sehr gutes Benetzungsvermögen für Chromstahl, Edelstahl und verschiedene Kunststoffe
- kompatibel mit Dismoclean 61 NR

Dismoclean 41 STS vereint in sich die Vorteile von Reinigungs- und Klarspülmittel.

Zusammensetzung

Organische Säure, oberflächenaktive Stoffe, Korrosionsinhibitoren, Sequestermittel, Lösungsvermittler, Farbstoff.

Anwendungsgebiete

In thermisch arbeitenden Steckbeckenautomaten mit saurem Verfahren, in denen Urinflaschen, Steckbecken und weitere Utensilien aufbereitet werden.

Nicht für Steckbeckengeräte mit Gusseisen und Kupfer verwendbar.

Anwendung

Dismoclean 41 STS wird als Konzentrat geliefert und entsprechend den Empfehlungen der Gerätehersteller an die Dosierpumpe angeschlossen. Die optimale Dosierung hängt im Wesentlichen von der Härte des Wassers ab. Die Verwendung von enthärtetem Wasser verbessert die Produkteigenschaften und reduziert zugleich den Verbrauch.

Kompatibilität

Bei Vorhandensein einer zweiten Sauglanze kann als Reinigungsverstärker das kompatible Präparat Dismoclean 61 NR verwendet werden.

Dosierung

- 0,1 % entmineralisiertes bis weiches Wasser (bis 7 °dH)
- 0,15 % mittleres Wasser (> 7 – 15°dH)
- 0,2 % hartes bis sehr hartes Wasser (> 15 °dH)

Gutachten

Materialverträglichkeitsgutachten stehen auf Anforderung zur Verfügung.

Listung

CE-Kennzeichnung gemäß Medizinproduktegesetz (MPG).

Chemisch physikalische Daten

Aussehen	blaue Flüssigkeit
pH-Wert Konzentrat	< 2
pH-Wert der Lösung:	
0,10 %ig	ca. 3
0,15 %ig	ca. 3
Dichte (20 °C)	ca. 1,1 g/cm ³

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG: Xi Reizend. Reizt die Augen. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind daher die Grundmaßnahmen zum Schutz der Beschäftigten entsprechend der Schutzstufe 2 § 9 GefStoffV zu beachten. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusage. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Dismoclean® 41 STS				
Kanister	5 kg	910 740	06880060	1

Wir forschen für den Infektionsschutz. www.bode-science-center.de.

