

schülke wipes safe & easy

Befüllung unter hygienischen Bedingungen.

safe & easy
bag-in-box system


Schritt 1

Zum Personalschutz sowie zum Schutz der schülke wipes safe & easy empfehlen wir die Arbeitsfläche und die Hände zu desinfizieren, sowie das Tragen von Schutzkittel, Schutzbrille und Handschuhen.*



Schritt 2

Öffnen Sie das selbsthaftende Siegel-etikett des Bags. Auf hygienisches Arbeiten achten, Handschuhe nicht während der Arbeit kontaminieren!

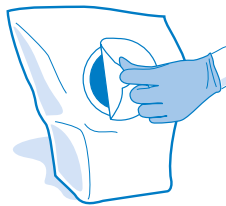

Schritt 3

Kleben Sie das Siegel-etikett auf die dafür vorgesehene Seite der Spenderbox.



Schritt 4

Ziehen Sie das innerste Tuch der Rolle ein Stück heraus, gießen Sie einmalig 2 Liter bei einem gebrauchsfertigem Produkt** und 3 Liter Gebrauchslösung aus einem angesetztem Konzentrat

langsam spiral-förmig über die Vliesrolle im Bag.



Schritt 5

Setzen Sie den Deckel auf die Bag-öffnung und ziehen Sie das innerste Tuch der Vliestuchrolle in die sternenförmige Entnahmeöffnung des Verschlusses.



Schritt 6

Verschrauben Sie den Verschluss mit dem Bag.



Schritt 7

Setzen Sie den Bag in die Spenderbox ein.



Schritt 8

Befestigen Sie den Deckel mit der Spenderbox.



Schritt 9

Füllen Sie das Siegel-etikett an der Seite der leeren Spenderbox vollständig aus.



Schritt 10

Die Tücher sind nach 30 Minuten Wartezeit vollständig durchtränkt.

Verwerfen Sie das erste Tuch und verschließen Sie die Schutzkappe des Verschlusses sorgfältig.

30 Min.
warten



Schritt 11

Das schülke wipes safe & easy Feuchttuch-Spendersystem ist nun einsatzbereit.



Aufbereitung/ Wiederbefüllung des Spendersystems

Entsorgen Sie bitte den Bag mit etwaigen Produktresten und Tüchern nach Ablauf der Standzeit von bis zu 28 Tagen oder im Rahmen einer Wiederbefüllung ordnungsgemäß.

Die Tücher haben aufgrund des schützenden Bags keinen Kontakt zu der Box oder dem Deckel. So kann sich kein Biofilm bilden. Trotzdem empfehlen wir eine regelmäßige Desinfektion der Box samt Deckel mit einem Schnelldesinfektionsmittel.

Die Nachbefüllung des Spendersystems erfolgt analog der Erstbefüllung.

* Gemäß TRBA 250, Absatz 4.1.3.

** acryl® des, antifact® N liquid, mikroloid® AF liquid, mikroloid® sensitive liquid, pursept® A Xpress, terralin® liquid

schülke wipes safe & easy Befüllung unter hygienischen Bedingungen.

safe & easy
bag system

Schritt 1


Zum Personalschutz sowie zum Schutz der schülke wipes safe & easy empfehlen wir die Arbeitsfläche und die Hände zu desinfizieren, sowie das Tragen von Schutzkittel, Schutzbrille und Handschuhen.*



Schritt 2


Öffnen Sie das selbsthaftende Siegelklett des Bags.

Auf hygienisches Arbeiten achten, Handschuhe nicht während der Arbeit kontaminieren!

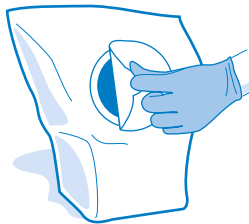


Schritt 3

Kleben Sie das Siegelklett auf die Rückseite des Bags und füllen Sie es vollständig aus.

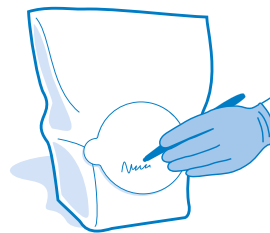

Schritt 4

Ziehen Sie das innerste Tuch der Rolle ein Stück heraus, gießen Sie einmalig 2 Liter bei einem gebrauchsfertigem Produkt** und 3 Liter Gebrauchslösung aus einem angesetztem Konzentrat langsam spiralförmig über die Vliesrolle im Bag.

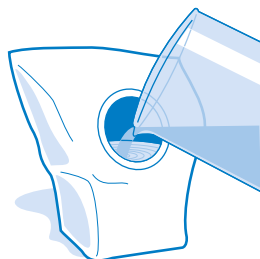

Schritt 5

Ziehen Sie das innerste Tuch der Vliestuchrolle in die sternförmige Entnahmöffnung des Verschlusses und verschrauben Sie diesen mit dem Bag.



Schritt 6

Die Tücher sind nach 30 Minuten Wartezeit vollständig durchtränkt.

Verwerfen Sie das erste Tuch und verschließen Sie die Schutzkappe des Verschlusses sorgfältig.

30 Min.
warten



Schritt 7

Die schülke wipes safe & easy sind nun einsatzbereit.



Entsorgen Sie bitte den Bag mit etwaigen Produktresten und Tüchern nach Ablauf der Standzeit von bis zu 28 Tagen ordnungsgemäß.

* Gemäß TRBA 250, Absatz 4.1.3.

** acryl® des, antifact® N liquid, mikrozyd® AF liquid, mikrozyd® sensitive liquid, pursept® A Xpress, terralin® liquid