

Instrumentendesinfektion

THERMO CLEAR

Spezialklarspüler für thermische Steckbeckenautomaten

- fördert eine schnelle, rückstandsfreie Trocknung des Spülguts
- verhindert Verkalkung der Steckbeckenspülen
- schaumarm

Präparatetyp

THERMO CLEAR ist geeignet zur chemothermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbeckenspülen. Es gewährleistet eine schnelle und rückstandsfreie Trocknung des Spülguts, verhindert eine Verkalkung der Steckbeckenspülen und ist sehr schaumarm eingestellt. **THERMO CLEAR** ist biologisch abbaubar gem. Detergenzienverordnung, da es auf Zitronensäure-Basis aufgebaut ist.

Anwendungsgebiete

THERMO CLEAR ist zur chemothermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbeckenspülen aller führenden Hersteller geeignet. **THERMO CLEAR** verhindert die Verkalkung von Steckbeckenspülen. **Hinweis:** Nicht anwenden für nicht-thermische Steckbeckenspülen.

Anwendung

Materialien entsprechend den Empfehlungen (z.B. Hygieneplan) in die Maschine einlegen. Sämtliche zu reinigende bzw. zu desinfizierende Oberflächen und Hohlräume müssen für die Maschinendesinfektion zugänglich sein. **THERMO CLEAR** zum Nachspülen entsprechend den Vorschriften der Automatenhersteller einfüllen.

Hinweis (bei Programmeinstellung beachten): Zudosierung erst ab 30 °C.

Dosierung

Je nach Automatentyp und Wasserhärte: 1 - 3 ml/l
(siehe Herstellerangaben) (0,1 - 0,3 %)

Dosierung durch Fachpersonal durchführen!

Eine Dosiertabelle in Abhängigkeit von der Wasserhärte kann zur Verfügung gestellt werden.



CE

Zusammensetzung

Organische Säuren < 30%, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren

Chemisch-Physikalische Daten

Form / Farbe: klare, farblose Lösung
pH-Wert: 2,0 + / - 0,5
Dichte: 1,045 g/ml

Lieferformen

Einzelpackung	VE	REF	PZN
5 L Kanister	3x5 L	00-127-050	-

Dosierhilfen

Kanisterumfüllhahn, Dosierpumpen für Kanister, Kanisterschlüssel.



THERMO CLEAR

Spezialklarspüler für thermische Steckbeckenautomaten

Besondere Hinweise

Verursacht schwere Augenreizung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produktstatus/Listungen

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Umweltinformation

Die Produkte der Dr. Schumacher GmbH werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt.



Die Dr. Schumacher GmbH ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS.

Wir sind Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.