

# DER VOLLTREFFER FÜR PROFI-FLÄCHENDESINFEKTION


## Incidin® Pro

Das aldehydfreie Desinfektionsmittel  
für Medizinprodukte und Oberflächen

**NEU!** JETZT AUCH  
IM PRAKTISCHEN  
DOSIERBEUTEL!

Incidin® Pro setzt mit seiner  
SMART-BALANCED-Formel einen neuen  
Standard für die Profi-Reinigung  
und Desinfektion von Oberflächen.

- ▶ Ihr Pro für Schnelligkeit
- ▶ Ihr Pro für Effektivität
- ▶ Ihr Pro für Verträglichkeit

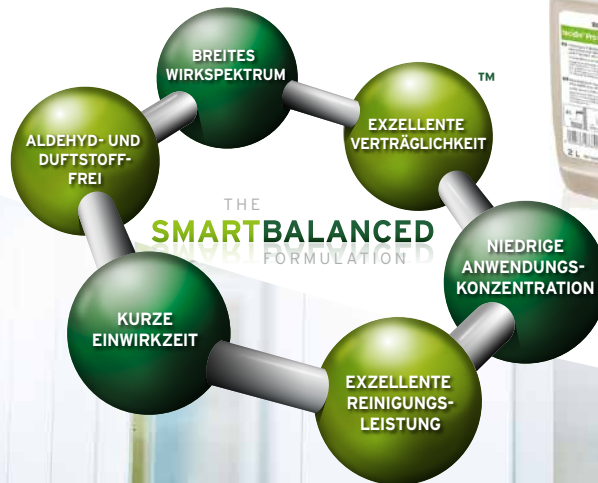

# Incidin® Pro

Das aldehydfreie Desinfektionsmittel für Medizinprodukte und Oberflächen

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Breites Wirkspektrum – nach den neuesten EN Standards getestet	Effektive Desinfektion und Reinigung
Kurze Einwirkzeiten bei niedrigen Anwendungskonzentrationen	Zeit- und Kostenersparnis
Exzellente Reinigungsleistung	Saubere Oberflächen mit hoher Materialkompatibilität
Exzellente Verträglichkeit	Verträglich mit Metallen, Linoleum, PVC, Keramik, Gummi und Kunststoff

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION		EINWIRKZEIT Min.
	%	ml/L	
<b>VAH-Liste (bakterizid, levurozid)</b>			
Flächendesinfektion gemäß DGHM 2001, mit Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	0,5/1	5/10	30/15
<b>IHO-Viruzidie-Liste</b>			
Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie 2008 (hohe Belastung)			
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004	0,25/0,5	2,5/5	30/15
Norovirus (MNV)	1,5	15	30
Rotavirus	1/1,5	10/15	60/5
Adenovirus	2	20	60
Papovavirus/Polyomavirus / SV40	1,5	15	15
<b>EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)</b>			
EN 13727 (bakterizid)	0,25	2,5	5
EN 13624 (levurozid)	0,25	2,5	5
EN 14348 (mykobakterizid)	1,5	15	60
EN 14476 (Norovirus, MNV)	1/1,5	10/15	60/30
<b>Flächendesinfektion nach DGHM 2001 (geringe und hohe Belastung)</b>			
Mykobakterizid, mit Mechanik	2/4	20/40	120/60

## ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtstrasse 7  
8304 Wallisellen  
Schweiz  
+41(0)44-877-2000  
www.ecolab.eu

## REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
+49(0)2173-599-1900  
www.ecolabhealthcare.de



SCHNELL.  
EFFEKTIV.  
VERTRÄGLICH.



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte



Flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat zur Desinfektion von Flächen aller Art.  
ⓓ BIOZID N-54665

## ANWENDUNGSHINWEISE

Gebrauchslösung durch Verdünnen mit Wasser (max. 30 °C) in der gewünschten Konzentration ansetzen.

Zu behandelnde Fläche feucht abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten.

Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Amin- bzw. aminderivat-haltige Desinfektionsmittel und aldehydhaltige Desinfektionsmittel sind nicht im Wechsel anwendbar. Bei Umstellung ist eine gründliche Zwischenreinigung notwendig.

## ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g ist als Wirkstoff enthalten: 10,0 g 2-Phenoxyethanol, 8,0 g N,N-bis-(3-Aminopropyl)dodecylamin, 7,5 g Benzalkoniumchlorid

## GUTACHTEN

Umfangreich geprüft – mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

## BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin® Pro Dosierbeutel	400 x 20 ml	30 765 60 PZN 108 328 71
Incidin® Pro Nachfüllflasche	3 x 2 L	30 766 80 PZN 101 793 88
Incidin® Pro Kanister	6 L	30 767 60 PZN 101 793 71
Incidin® Pro Kanister	30 L	30 767 80
Incidin® Pro Fass	200 L	30 767 90

BIOZIDE SICHER VERWENDEN.  
VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN.