

schülke -†



Leicht saurer Klarspüler für die maschinelle Aufbereitung von Medizinprodukten und Laborutensilien

thermosept® KSK

Unser Plus

- fleckenfreie Trocknung
- beugt Ablagerungen und Belagsbildungen an Geräten und Spülutern vor
- aktive Trocknungszeitverkürzung
- sehr gute Materialverträglichkeit
- optimale Benetzung des Spülgutes

Anwendungsgebiete

thermosept® KSK ist ein flüssiger, saurer Klarspüler für die maschinelle Aufbereitung von Medizinprodukten, medizinischen Instrumenten und Laborutensilien. thermosept® KSK beschleunigt den Trocknungsprozess und neutralisiert gleichzeitig eventuell aus der Reinigung verschleppte Restalkalität. Das Produkt unterstützt eine fleckenfreie Trocknung bei der thermischen Aufbereitung und beugt der Belagsbildung an Maschinen und Spülgut vor. thermosept® KSK ist zur Verwendung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, Taktbandanlagen und Betten-/Containerwaschanlagen geeignet. Die Verwendung von vollentsalztem Wasser wird empfohlen.

Anwendungshinweise

Dosierung:
0,1 - 0,2 %, (d.h. 1 - 2 ml/l).
Die Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen.
Bitte beachten Sie die Empfehlungen der Geräte- und Instrumentenhersteller.



Produktdaten

Zusammensetzung:

15 - 30 % nichtionische Tenside, Lösungsvermittler, Korrosionsinhibitoren, organische Säure.

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,03 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	39 °C / Methode: DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	ca. 1,8 / 20 °C / Konzentrat
Viskosität, dynamisch	ca. 9 mPa*s / Methode: ISO 3219

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept KSK 5 kg KA	1/Kanister	146604
thermosept KSK 20 l KA	1/Kanister	146608
thermosept KSK 500 kg EC	1/Container	146606

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	135810

Verwandte Produkte

- thermosept® RKF

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com. Für individuelle Fragen: Customer Care
Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 4665544
Fax +41 (0) 44 - 4665533
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9
1070 Wien
Österreich
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-0
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com