

Neutralisator auf Phosphorsäurebasis
zur maschinellen Aufbereitung von
Medizinprodukten und Laborutensilien.

thermosept® NKP

Unser Plus

- tensidfrei
- schaumfrei
- breites Anwendungsspektrum
- zur Neutralisation und Grundreinigung geeignet

Anwendungsgebiete

thermosept® NKP dient zur sicheren Neutralisation von chirurgischen Instrumenten, Anästhesiematerial, medizinischen Utensilien und Laborglas nach alkalischer Reinigung. thermosept® NKP löst zuverlässig säurelösliche Ablagerungen wie Kalk und beugt effektiv Belagsbildungen an Geräten und Spülgut vor. thermosept® NKP hat ein sehr gutes Abspülverhalten und ist auch für empfindliche Laborbereiche geeignet.

thermosept® NKP ist ebenfalls zur sauren Vorreinigung und als Grundreiniger für Instrumente, Innenkammern von RDG und als Reiniger im manuellen Tauchbad einsetzbar. Auch für die saure Reinigung von Tierkäfigen verwendbar.

Das aufzubereitende Spülgut sollte vor bei Einsatz von thermosept® NKP auf Säurebeständigkeit geprüft werden.

thermosept® NKP ist für den Einsatz in allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Taktbandanlagen geeignet.

Anwendungshinweise

Dosierung:

zur Neutralisation nach alkalischer Reinigung: 0,1 - 0,2 % (1 - 2 ml/l)

Anwendungsempfehlungen zur sauren Grundreinigung:

- zur sauren Vorreinigung 0,2 - 2 % (2 - 20 ml/l)
- zur Grundreinigung von Instrumenten und Maschineninnenräumen: 4 % (40 ml/l)
- als Reiniger im manuellen Tauchbad: 4 % (40 ml/l)

thermosept® NKP ist nicht einsetzbar bei Buntmetallen, verchromten Teilen und eloxiertem Aluminium. Auf Säurebeständigkeit des Spülgutes, der Maschine und der Abwasserleitung ist zu achten.

Generell wird die Verwendung von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung empfohlen.

Bitte beachten Sie die Empfehlungen der Geräte- und Instrumentenhersteller.



Produktdaten

Zusammensetzung:
Enthält Orthophosphorsäure.

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,43 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Form	flüssig
pH	ca. 1,2 / 20 °C / Konzentrat
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept NKP 6 kg KA	1/Kanister	146403
thermosept NKP 20 l KA	1/Kanister	146409
thermosept NKP 10 l KA	1/Kanister	70000172
thermosept NKP 200 kg FA	1/Fass	146406

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Kanisterschlüssel 5/10 l	135801

Verwandte Produkte

- thermosept® alka clean forte
- thermosept® RKF

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com. Für individuelle Fragen: Customer Care
Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 4665544
Fax +41 (0) 44 - 4665533
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9
1070 Wien
Österreich
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-0
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com