

schülke -t



pH-neutraler, enzymatischer Reiniger für die maschinelle Aufbereitung von empfindlichen Medizinprodukten

thermosept® RKN-zym

Unser Plus

- enzymatisch, pH-neutral
- schaumarm
- hervorragende Materialverträglichkeit, insbesondere bei eloxiertem Aluminium
- schonende Reinigung universell verwendbar

Anwendungsgebiete

thermosept® RKN-zym ermöglicht eine schonende, effektive Reinigung von chirurgischen und mikrochirurgischen Instrumenten, starren Endoskopen, Anästhesiezubehör, Entsorgungs- und Sterilgutcontainern. thermosept RKN-zym verfügt über eine sehr gute Materialverträglichkeit gegenüber Metallen, Kunststoffen, Glas und kann auch für die Aufbereitung von empfindlichen Materialien wie eloxiertem Aluminium verwendet werden. thermosept® RKN-zym ist für die universelle Verwendung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Taktbandanlagen geeignet.

Anwendungshinweise

Dosierung:

Je nach Grad der Verschmutzung wird eine Dosierung von 0,3 - 0,5 % (3 - 5 ml/l) empfohlen.

Die optimale Reinigungsleistung erzielt thermosept® RKN-zym bei Temperaturen zwischen 40 und 45 °C.

Im Reinigungsschritt sowie in der Schlusspülung ist die Verwendung von vollentsalztem Wasser zu empfehlen. Wird kein vollentsalztes Wasser verwendet, empfiehlt sich zur Vermeidung von Ablagerungen und Verfärbungen die Verwendung von thermosept® NKZ im Neutralisationsschritt. Bitte beachten Sie die Empfehlungen der Geräte- und Instrumentenhersteller. Die Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen.



Produkt Daten

Zusammensetzung:

Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5 - 15 %

nichtionische Tenside, Enzyme.

Enthält Fettalkoholalkoxyolat, modifiziert.

Weitere Inhaltsstoffe: Lösungsvermittler,
Korrosionsinhibitoren.

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,01 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	hellgelb
Flammpunkt	45 °C / Methode : DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	6 - 7,5 / 20 °C / Konzentrat

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept RKN-zym 5 kg KA	1/Kanister	187005
thermosept RKN-zym 10 kg KA	1/Kanister	187007
thermosept RKN-zym 20 l KA	1/Kanister	187008
thermosept RKN-zym 200 kg FA	1/Fass	187003

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Kanisterschlüssel 5/10 l	135801
Kanisterschlüssel für 20 + 25 l	135901

Verwandte Produkte

- thermosept® NKZ

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com. Für individuelle Fragen: Customer Care
Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 4665544
Tel. +41 (0) 44 - 4665533
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9
1070 Wien
Österreich
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-0
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com