

schülke -†



Saurer Klarspüler und Enthärter für die thermische Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen

thermosept® SEK

Unser Plus

- beseitigt vorhandene Kalkbeläge und verhindert dessen Aufbau
- fördert eine rückstandsfreie Trocknung und verkürzt die Trocknungszeit
- schaumarme Formulierung
- gute Materialverträglichkeit

Anwendungsgebiete

thermosept® SEK ist ein leicht saurer Klarspüler und Enthärter. thermosept® SEK eignet sich für die Verwendung zur thermischen Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen in marktüblichen Geräten. Die spezielle Kombination von Tensiden und Säuren schützt Spülgut und Geräte vor Ablagerungen und unterstützt eine fleckenfreie Abtrocknung.

Anwendungshinweise

Dosierung:
0,01 % pro 1° dH, das entspricht einer Dosierung von 0,1 - 0,3 %, (1 - 3 ml/l Wasser).

Die Dosierung erfolgt über maschineneneigene Dosierpumpen, diese sind auf Säurebeständigkeit zu prüfen. Sollte bereits eine starke Verkalkung des Heizstabes festgestellt worden sein, wird empfohlen, vor dem Einsatz von thermosept® SEK eine Entkalkung vorzunehmen (z.B. mit thermosept® NKZ oder thermosept® NKP). thermosept® SEK verhindert auch bei hartem Wasser Kalkablagerungen im Verdampfer und am Heizstab. Um Verkalkungen generell vorzubeugen, sollte in regelmäßigen Abständen Wartungen der Steckbecken-Automaten erfolgen.



Produktdaten

Zusammensetzung:
thermosept® SEK enthält organische Säuren, nichtionische Tenside, Komplexbildner.

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,06 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	66 °C / Methode: DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	ca. 1 - 2 / 20 °C / Konzentrat

Besondere Hinweise

Behälter dicht geschlossen halten. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept SEK 5 kg KA	1/Kanister	120002
thermosept SEK SOKA 5 kg KA	1/Kanister	120003
thermosept SEK 10 kg KA	1/Kanister	120005

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	135810

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com. Für individuelle Fragen: Customer Care
Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 4665544
Fax +41 (0) 44 - 4665533
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9
1070 Wien
Österreich
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-0
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com