

## Anwendungshinweise

Das Sitty® Air Sitzkissen wird gebrauchsfertig geliefert, der Luftdruck/Härtegrad kann jedoch mit Hilfe der beiliegenden Pumpe individuell angepasst werden.

- Aufpumpen (Härtegrad erhöhen): Ventil zusammendrücken, die angefeuchtete Nadel einführen (**Achtung: Kissen nicht durchstechen!**) und solange aufpumpen, bis der gewünschte Härtegrad erreicht ist.



- Luft ablassen (Härtegrad verringern): Ventil zusammendrücken, die angefeuchtete Nadel ohne Pumpe einführen (**Achtung: Kissen nicht durchstechen!**). Jetzt auf das Sitzkissen drücken und die Luft solange entweichen lassen bis der gewünschte Härtegrad erreicht ist.

