

Kuschelfreunde

KRYOTHERM[®] natur

Kuschelfreunde

KRYOTHERM[®] natur



Pinguin
»Pit«

Dromedar
»Dora«

Frosch
»Freddy«

Kuh
»Karla«



Werkmeister GmbH + Co. KG
Eschweger Straße 10 • D-37281 Wanfried
Fon +49 (0) 5655 9899-0 info@werkmeister-gmbh.de
Fax +49 (0) 5655 9899-22 www.werkmeister-gmbh.de
QM-Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485

Werkmeister[®]

Art. Nr. 8602



Werkmeister[®]

Indikationen

- Atemwegsinfekte/
Erkältungsbeschwerden
- Bauchschmerzen und
Blähungen
- Darmträgheit
- Ohrenschmerzen
- Rückenschmerzen und
Verspannungen

Nicht anwenden bei Kreislauf-
erkrankungen, Fieber und
Empfindungsstörungen.
Sollten Sie Zweifel haben, fra-
gen Sie bitte vor der Anwen-
dung Ihren Arzt.

Erwärmung in der Mikrowelle

Das Säckchen (nicht das kom-
plette Plüschtier) solange in
30-Sekunden-Intervallen er-
wärmen, bis die gewünschte
Temperatur erreicht ist.

Erwärmung im Backofen

Im Backofen ebenfalls nur das
Säckchen ca. 3 Minuten bei
100 °C erwärmen.
Auf das Backblech bzw. den
Grillrost immer Backpapier
unterlegen, um Verbren-
nungen zu vermeiden.

Wichtige Hinweise

- Hat Ihre Mikrowelle einen
Drehteller, achten Sie da-
rauf, dass dieser sich frei
dreht.
- Das Säckchen auf keinen
Fall überhitzen und beim
Erwärmen in der Mikrowelle
oder im Backofen nicht un-
beobachtet lassen.
- Die Anwendung ist le-
diglich unterstützend zur
Eigentherapie gedacht und
ersetzt auf keinen Fall den
Arztbesuch.

- Das Himbeerkern-Säckchen
unzugänglich für Kinder
aufbewahren.
- Nicht geeignet für Kinder
unter 3 Jahren!

Materialien

- Füllung: Himbeerkerne

Pflege- und Waschinweise

Nach dem Gebrauch das Säck-
chen gut trocknen lassen und
anschließend trocken lagern.
Das Plüschtier ist waschbar
(siehe Etikett).