

Kryotherm® natur Wärmetiere

Indikationen

- Atemwegsinfekte
Erkältungsbeschwerden
- Bauchschmerzen und Blähungen
- Darmträgheit
- Rückenschmerzen und
Verspannungen

Nicht anwenden bei Kreislauf-
erkrankungen, Fieber und
Empfindungsstörungen.
Sollten Sie Zweifel haben, fragen
Sie vor dem Gebrauch bitte Ihren
Arzt.

Erwärmen in der Mikrowelle

- Das Rapssamen-Säckchen (nicht
das ganze Wärmetier) solange
in 30-Sekunden-Intervallen
erwärmen, bis die gewünschte
Temperatur erreicht ist
- Verfügt die Mikrowelle über einen
Drehteller bitte darauf achten,
dass dieser sich frei drehen kann

Erwärmen im Backofen

- Nur das Säckchen ca. drei Minuten
bei etwa 100 °C erwärmen
- Beim Erwärmen immer Backpapier
unterlegen, um Beschädigungen
zu vermeiden

Bitte beachten

- Nicht unbeaufsichtigt erwärmen
- Um Verbrennungen zu vermeiden,
vor dem Gebrauch die Temperatur
prüfen
- Die Anwendung ist unterstützend
zur Eigentherapie gedacht und
ersetzt nicht den Arztbesuch
- Das Rapssamen-Säckchen
unzugänglich für Kinder lagern
- Nicht geeignet für Kinder unter
3 Jahren

Materialien

- Füllung: 100 % Rapssamen

Pflege- und Waschinweise

- Wärmetier: siehe Wäscheetikett
- Säckchen: Nach dem Gebrauch im
getrockneten Zustand lagern und
erst nach vollständiger Trocknung
wieder verwenden
- Um ein Austrocknen zu
vermeiden, sollten Sie bei etwa
jeder zehnten Erwärmung eine
Tasse Wasser mit in die Mikrowelle
oder den Backofen stellen

**Artikel nur für den bestimmungs-
gemäßen Gebrauch verwenden!**

