

Kalt- / Warmkompresse

Produktübersicht:

Kompressen

Art./REF	Größe
8501	13 x 14 cm
8502	12 x 29 cm
8503	16 x 26 cm
8504	21 x 38 cm
8505	30 x 40 cm



Befestigungsbandage

Art./REF	Größe
8523	90 x 7,5 cm



Kombipack

Art./REF	Kompressengröße	Befestigungsbandage
8508	12 x 29 cm	90 x 7,5 cm



Kalt- / Warmkomresse

Die Kalt- / Warmkomresse ist wiederverwendbar und kann zur Linderung vieler Beschwerden angewandt werden. Im Lieferumfang ist eine Schutzhülle enthalten. Damit die Komresse auch bei Bewegungen getragen werden kann, bieten wir zusätzlich eine Befestigungsbandage an.

Indikationen

Warmkomresse:

- Gelenkrheuma
- Arthrose
- Hexenschuss
- Ischias
- Verspannungen der Muskulatur

Kaltkomresse:

- Verstauchungen, Quetschungen, Blutergüsse etc.
- Eindämmung von Nasenbluten
- Kühlung von Entzündungen
- Temperaturerhöhung
- Migränebehandlung

Nicht anwenden bei arteriellen Durchblutungsstörungen, Raynaud Syndrom, Herz-/Kreislauferkrankungen und Empfindungsstörungen.

Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie Ihren Arzt.

Anwendungshinweise

Warmkomresse:

In der Mikrowelle je nach Größe bei 280 Watt erwärmen.

- 13 x 14 cm 2 Minuten
- 12 x 29 cm 4 Minuten
- 16 x 26 cm 4 Minuten
- 21 x 38 cm 6 Minuten
- 30 x 40 cm 10 Minuten

Im Wasserbad bei maximal 80°C ca. 5 - 10 Minuten erwärmen.

Kaltkomresse:

Vor der Verwendung mindestens 2 Stunden bei max. -25°C im Gefrierschrank kühlen.

Wichtige Hinweise

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Vor dem Erwärmen die Gelmasse gleichmäßig in der Komresse verteilen
- Sollte sich die Komresse während des Erwärmens in der Mikrowelle aufblähen, die Mikrowelle sofort ausschalten
- Die Komresse ist nur zur äußeren Anwendung gedacht, darf aber nie direkt auf die nackte Haut gelegt werden
- Kinder mit dem Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen
- Bei Beschädigung die Komresse nicht mehr verwenden und mit dem Hausmüll (Restmüll) entsorgen

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Haut- und Augenkontakt vermeiden. Nicht einatmen: Nebel, Aerosole
- Rutschgefahr! Gel mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Universalbinder) aufnehmen


Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Nach Hautkontakt:** Mit Wasser und Seife abwaschen. Nachspülen.
 - **Nach Augenkontakt:** Sofort die Augen mit viel Wasser spülen.
 - **Nach Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen. Wasser trinken.
- Bei Reizung oder Unwohlsein bitte einen Arzt hinzuziehen!

Materialien

- Komresse: Kalt- / Warmkompressen-Gel
- Schutzhülle: Vliesstoffhülle aus Polypropylen

Pflege- und Waschinweise

- Komresse: Trocken und dunkel lagern
- Schutzhülle: 

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!