

S&M[®] labor



Einen Überblick aller zum
Präparat S&M[®] labor
vorliegenden Gutachten/ Literatur
finden Sie im Internet unter
www.schuelke-mayr.com

Für Ihre individuellen Fragen:
Produkt-/ Anwendungsberatung
Telefon 040 / 521 00-666

- gute Materialverträglichkeit
- gute Reinigungsleistung

Präparate-Typ

S&M[®] labor ist ein Pulverreiniger zur selbsttätigen und schnellen Reinigung von medizinischen Instrumenten aus Metall, Kunststoff, Glas, Gummi und Porzellan.

Anwendungsgebiete

S&M[®] labor wird für die Reinigung von medizinischen Instrumenten eingesetzt. [CE]

Produktdaten

- **Kennzeichnung gem. VO (EG) 648/2004:**
 - < 5 % nichtionische Tenside
 - > 30 % Phosphate**Weitere Inhaltsstoffe:**
Korrosionsinhibitoren

■ Chemisch-physikalische Daten:

Konzentrat:

Aussehen: rieselfähiges, weißes Pulver
Temperaturstabilität: - 50 °C bis + 40 °C

Gebrauchslösung:

Aussehen: klare Lösung, bei Temperaturen oberhalb ca. 50 °C trübe Lösung
pH-Wert: 0,5 %-ig – 10,8
1,0 %-ig – 10,9

Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
800-g-Dose	10 x 800 g	110601
10-kg-Eimer	1 x 10 kg	110603

Anwendungskonzentration / Einwirkzeit

Bei normaler Verschmutzung: 0,5 % (10 g = 1 gestr. Messlöffel auf 2 l warmes Wasser)

Bei stärkerer Verschmutzung: 1,0 % (10 g = 1 gestr. Messlöffel auf 1 l warmes Wasser)

Anwendungsmethoden / -hinweise

S&M® labor kann mit kaltem, warmem und heißem Wasser angesetzt werden. Eine Eintrübung der Lösung bedeutet keine Beeinträchtigung der Reinigungsleistung.

Instrumente sofort nach Gebrauch in die Gebrauchslösung einlegen und 10 Min. einwirken lassen.

Das Reinigungsgut muß vollständig bedeckt sein. Bei geringen Verschmutzungen die Dosis und/oder Einwirkzeit vermindern, bei hartnäckigen Verunreinigungen erhöhen, ggf. zusätzlich mit einer Instrumentenbürste bearbeiten.

Anschließend gründlich abspülen.

Eine tägliche Erneuerung der Gebrauchslösung wird empfohlen.

S&M® labor eignet sich auch für den Einsatz im Ultraschallbad.

Labortests werden nicht gestört, da sich S&M® labor rückstandslos ausspülen läßt. Selbst empfindliche enzymatische oder serologisches Reaktionen werden nicht beeinflusst, wenn zum Nachspülen destilliertes Wasser benutzt wird.

Kombination mit Desinfektionsmitteln

Zur Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsgang ist S&M® labor speziell auf die Kombination mit Gigasept® oder alternativ mit Lysetol® FF abgestimmt worden. Eine solche Gebrauchslösung ist täglich zu erneuern.

Materialverträglichkeit

Für alkaliempfindlich Materialien, wie z. B. Aluminium, Zink oder Legierungen mit ähnlichem Verhalten ist S&M® labor nicht geeignet.

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

(gilt für das Konzentrat)

Xi: Reizend. **R36/R38:** Reizt die Augen und die Haut. **S26:** Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Umweltinformation



Packmittel-Informationen

Die Behältnisse und Verschlüsse bestehen aus Polyethylen (HDPE) und aus Polypropylen und sind entsprechend gekennzeichnet. Dadurch wird eine sortenreine Trennung für eine optimale Wiederverwertung ermöglicht.


Die Etiketten bestehen aus PE. S&M-Packmittel sind PVC-frei und recyclingfähig.

Besondere Hinweise

- Nicht einnehmen.
- Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- Benetzte Körperstellen gut mit Wasser abspülen.
- Die UVV schreibt im Umgang mit nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln das Tragen von Handschuhen vor.
- Nach Ablauf des Verfalldatums Präparat nicht mehr anwenden.



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. D 150 00003

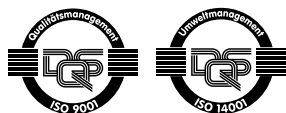

Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 (**Reg.-Nr. 004567 MP21**) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gemäß Öko-Audit-Verordnung (**Reg.-Nr. DE-S-150 00003**).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Deutschland
Telefon +49-40-521 00-0
Telefax +49-40-521 00-318
www.schuelke-mayr.com
mail@schuelke-mayr.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Schweiz
Telefon +41-44-252 98 02
Telefax +41-44-252 98 27
mail.ch@schuelke-mayr.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Zieglergasse 8
1070 Wien, Österreich
Telefon +43-1-523 25 01
Telefax +43-1-523 90 35
office@schuelke-mayr.at