

Neutraler Klarspüler und Trocknungsbeschleuniger Dismoclean® 64 neutra-dry



Dismoclean® 64 neutra-dry

Neutraler Klarspüler und Trocknungsbeschleuniger für den Einsatz in Spülmaschinen.

Charakteristik

- Verkürzung der Trocknungszeit
- reduziert Oberflächenspannung
- hohe Materialverträglichkeit
- verhindert Fleckenbildung
- pH-neutral

Dismoclean 64 neutra-dry verkürzt die Trocknungszeit um bis zu 50 % und bietet dabei zugleich ein einwandfreies Trocknungsergebnis.

Zusammensetzung

Oberflächenaktive Stoffe, organische Säuren, Konservierungsmittel.

Dosierung

Die optimale Dosierung hängt im wesentlichen von der Härte des Wassers ab. Dank eingebauter organischer Säuren wird eine Ausfällung eventuell vorhandener Härtebildner und Metallionen verhindert. Generell sollte jedoch für die Schlusspülung VE-Wasser verwendet werden. Folgende Dosierung hat sich in der Praxis bewährt: 0,05 - 0,1 %.

Anwendung

Dismoclean 64 neutra-dry kann bei thermischen Verfahren in den Einsatz gelangen. Dazu wird es in das letzte Spülwasser das bei den Vario-Verfahren gleichzeitig die thermische Desinfektion beinhaltet, zudosiert.

Materialverträglichkeit

Dismoclean 64 neutra-dry ist einzusetzen bei Edelstahl, Aluminium, eloxiertem Aluminium, verchromten Materialien, Kunststoffen, Gummi, Latex, Glas, keramischen Werkstoffen. Bei der Verwendung eines Klarspülers/Trocknungsbeschleunigers können auf Oberflächen verbleibende Tensidreste bei einer nachfolgenden Dampfsterilisation zu Materialrissen führen, sofern es sich hierbei um unter Spannung stehende Kunststoffstrukturen handelt. Die Herstellerangaben der jeweiligen Medizinprodukte sind – auch im Hinblick auf die Sterilisation – zu berücksichtigen. Die Firma Aesculap rät von der Verwendung von Klarspülers/Trocknungsbeschleunigern bei der Aufbereitung der aus PPSU gefertigten Deckel der PrimeLine Container ab.

Listung

CE-Kennzeichnung gemäß Medizinproduktegesetz (MPG).

Chemisch physikalische Daten

Aussehen	klare, farblose bis gelbliche Flüssigkeit
pH-Wert Konzentrat	ca. 8
pH-Wert 0,05 - 0,1 %ige Lösung	ca. 8
Dichte (20 °C)	1,0 g/cm ³



	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Dismoclean® 64 neutra-dry				
Kanister	5 kg	974 199	01574826	1
Kanister	10 kg	974 191	01574832	1
Kanister	25 kg	974 197	01574849	1

Kennzeichnung für das Konzentrat: Achtung. Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Stand der Information: 04/2015.

Hinweis: Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

PAUL HARTMANN AG
Postfach 14 20
89504 Heidenheim
Deutschland

Telefon +49 7321 36-0
Telefax +49 7321 36-3636
info@hartmann.info

www.hartmann.de

(11.15) 084 370/5

ClimatePartner®
klimaneutral
Druck | ID: 10661-1209-1003



Gesundheit ist
unser Antrieb