

DESO WIPES

Vliestücher zur Tränkung mit Desinfektionsmitteln im wiederbefüllbaren Spendersystem

**Hochwertiger Vliesstoff
Verfügbar in zwei Größen**

CE

Produktbeschreibung

DESO WIPES DT Wischtücher können zur schnellen und unkomplizierten Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten in allen Bereichen eingesetzt werden. Die trocken gelieferten Wischtücher sind sowohl für die Anwendung mit Flächenwischdesinfektionsmitteln als auch mit Präparaten zur Schnelldesinfektion geeignet. Sie sind verfügbar in zwei Größen

Die Entnahme erfolgt aus dem speziell konzipierten FEUCHTTUCHSPENDER, der in zwei Größen verfügbar ist. Der Spender ist beständig gegenüber Desinfektionsmitteln sowie spülmaschinenfest bis 60 °C. Für die Spender sind abschließbare Wandhalterungen verfügbar.

DESO WIPES DT wurden speziell für die Desinfektion entwickelt. Für die Präparate der DESOMED wurde in Anwendungsgutachten die definierte Abgabe der Wirkstoffe über einen Zeitraum von 28 Tagen nachgewiesen.

Das Produktsystem ist außerordentlich wirtschaftlich und hygienisch einwandfrei, da im Gegensatz zu offen bereitgestellten Desinfektionsmittellösungen mit diesem System die Anwendungslösung nicht verworfen werden muß. Sie bleibt vor Kontaminationen geschützt.

Anwendung

Für die kleine Variante werden je nach gewünschter Feuchtigkeit 1-1,5 Liter, in der großen Variante 2-2,5 Liter Anwendungslösung benötigt.

Die Rolle mit den Tüchern wird in den Feuchttuchspender eingesetzt und mit der Anwendungslösung getränkt. Das erste Tuch wird aus der Mitte der Tuchrolle herausgezogen und innen durch die Applikationsöffnung des Deckels geführt. Der Spender wird dann verschlossen. Nach ca. 60 min. ist eine vollständige Tränkung aller Tücher erfolgt, das System ist einsatzbereit. Vor Neubefüllung ist das Spendersystem ggf. zu reinigen.

DESO WIPES DT können einzeln aus der Applikationsöffnung entnommen werden. Nachfolgende Tücher sind durch die Wiederverschließbarkeit des Spendersystems vor Austrocknung und Kontamination geschützt.

Spezielle Etiketten zur Beschriftung und Chargendokumentation liegen jeder Tuchrolle bei.

Tränkflüssigkeiten

In Kombination mit den DESO Wipes können die folgenden Präparate verwendet werden:

Flächenwischdesinfektion:	Schnelldesinfektion:
Biguamed Perfekt	Desomed Rapid AF
Desotop	Acrydes GF
Desomed Perfekt	

Lieferformen

Feuchttuchspender:

Einzelpackung	Verk.-Einheit	Art.-Nr.
Feuchttuchspender	1 x 1 Spender	025-00010
Feuchttuchspender	6 x 1 Spender	025-00060
Feuchttuchspender klein	1 x 1 Spender	025-00111

Wandhalter:

Einzelpackung	Verk.-Einheit	Art.-Nr.
Wandhalter	1 x 1 Wandhalter	00-902-EIM
Wandhalter klein	1 x 1 Wandhalter	00-902-EIMK

DESO WIPES

Einzelpackung	Verk.-Einheit	Art.-Nr.
Rolle (90 Tücher)	3 x 1 Rolle	025-00003
Rolle (90 Tücher) (Tuchgröße: 32 x 30 cm)	6 x 1 Rolle	025-00006
Rolle, klein (70 Tücher) (Tuchgröße: 25 x 25 cm)	1 x 1 Rolle	025-00111