

Medizid[®] Rapid Optima

Unsere gebrauchsfertige Sprühwischdesinfektion zur Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten

Präparatetyp

Medizid[®] Rapid Optima ist ein gebrauchsfertiges, schnell wirkendes Präparat zur Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenständen in medizinischen Einrichtungen. Ideal zwischen Behandlungen und Eingriffen, wenn praxisgerechte Einwirkzeiten erforderlich sind.

Anwendungsbereiche

Für alle alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten, insbesondere für Geräteoberflächen und Gegenstände im patientennahen Umfeld in Kliniken, Praxen und Pflegeheimen.

Anwendung

Gebrauchsfertig. Gegenstände und Oberflächen mit SprayIn Neu vollständig benetzen, antrocknen lassen und ggf. mit Einmaltuch nachwischen. Trocknet schnell ab.

Haltbarkeit

Medizid[®] Rapid Optima kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Die Mindesthaltbarkeit beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.

Einwirkzeit:

Wirksamkeiten	vollständig benetzt
Nach VAH/ DGHM:	
Bakterizid, levurozid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae)	1 min.
MRSA	1 min.
Begrenzt viruzid (nach DWV):	
BVDV/Vaccinia (inkl. HBV, HCV, HIV)	30 sec.
Viruswirksamkeiten:	
Rota	30 sec.
Noroviren	15 min.
Adeno	15 min.
Polyoma/SV 40	5 min.

REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
00949D	500 ml	18 Flaschen	11169771



Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:
0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid,
43,0 g Ethanol.

Präparatteeigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Aldehydfrei
- Schnell und umfassend wirksam, in bereits 60 sec.
- Wirkt bakterizid, levurozid, fungistatisch, tuberkulozid (inkl. M.-terrae)
- Wirksam gegen alle behüllte Viren BVDV) und Vaccinia (inkl. HCV/ HBV/HIV)
- Wirksam gegen unbehüllte Viren: Rota, Adeno, SV40, Noroviren
- Rückstandsfrei
- Angenehmer Geruch
- Gute Materialverträglichkeit, auch bei empfindlichen Materialien
- Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie Acrylglas!
- Geprüft nach den Standardmethoden der DGHM und der RKI-Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren
- VAH-gelistet
- IHO-gelistet