

deconex® 64 NEUTRADRY

Neutraler Klarspüler und Trocknungsbeschleuniger, biokompatibel

Für die Instrumentenaufbereitung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG)



Verwendung

deconex® 64 NEUTRADRY wird als Trocknungshilfe und Klarspüler in Spülmaschinen für medizinische Instrumente und Utensilien eingesetzt. Die Dosierung erfolgt in das letzte Spülwasser, mit dem in der Regel auch die thermische Desinfektion (80-93 °C) durchgeführt wird.

Eigenschaften

deconex® 64 NEUTRADRY

- entspannt das Wasser
- verkürzt die Trocknungszeit um bis zu 50%
- ist biokompatibel und entsprechend zertifiziert
- ist pH-neutral eingestellt
- hat leichte Schmiereigenschaften (Gelenke)

Inhaltsstoffe

Oberflächenaktive Stoffe, organische Säuren, Konservierungsmittel

Chemisch-/physikalische Daten

pH-Wert	1%ige Lösung in VE-Wasser	ca. 7.9
Dichte	Konzentrat	1.01 g/mL
Aussehen	Konzentrat	klare, farblose bis gelbliche Flüssigkeit

Dosierung

0.3-1.0 mL/L (je nach Qualität des Spülwassers)

Anwendungshinweise

Für die thermische Desinfektion/Schlussspülung sollte immer entionisiertes Wasser verwendet werden.

Materialverträglichkeit

Das Produkt zeichnet sich durch eine breite Materialverträglichkeit aus. Es ist jedoch folgendes zu beachten:

Zubehöerteile von Anästhesieutensilien aus Polysulfon (PSU) sowie aus Polyphenylsulfon (PPSU) wie z.B. Konnektoren von Larynxmasken, Ventile, Adaptoren und Teile von Instrumenten-Containerdeckeln können bei Kontakt mit Nachspülmitteln herstellungsbedingt Spannungsrisse bilden. Sie sind jeweils auf Eignung vorzuprüfen.

deconex® 64 NEUTRADRY

Lieferung

Bitte fragen Sie Ihre Vertretung nach den aktuellen Gebindegrößen.

Die Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus recycelbarem Polyethylen.

Zusätzliche Informationen

Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und Entsorgung/Abwasser entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns für praktische Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung.

Vertreter:

Borer Chemie Deutschland GmbH

Wallbrunnstraße 24, 79539 Lörrach

Vertrieb:

Robert-Bosch-Str. 1, 78234 Engen

Tel. +49 7733 3603530, Fax +49 7733 3603539

office@borerchemie.de, www.borerchemie.de

Hersteller:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel. +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.