

# TÜCHER ZUR ALKOHOLISCHEN SCHNELLDESINFEKTION

## Incides® N

Zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art

**Breites Wirkspektrum gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen.**

Hohe Desinfektionsleistung auf allen alkoholbeständigen Flächen. Wirksamkeit anhand der vom Tuch abgegebenen Tränklösung getestet.

- ▶ Kurze Einwirkzeiten
- ▶ Direkt einsetzbar
- ▶ Dermatologisch begutachtet



# Incides® N

Zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Nachgewiesene Wirkstoffabgabe aus dem Tuch in angegebener Konzentration	Hohe Desinfektionsleistung, Wirksamkeitsgutachten basieren auf den realen Arbeitsbedingungen
Gebrauchsfertige Tücher mit besonders kurzen Einwirkzeiten	Optimale Desinfektion von Medizinprodukten und allen alkoholbeständigen Oberflächen
Dermatologisch begutachtet mit frischem Duft	Hohe Anwenderfreundlichkeit und angenehm im Gebrauch


WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION	EINWIRKZEIT Min.
<b>VAH-Liste (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)</b>		
Flächendesinfektion gemäß VAH, mit Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	konzentriert	5
<b>Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie</b>		
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004*	konzentriert	0,5
Rotavirus*	konzentriert	5
Adenovirus*	konzentriert	15
Papovavirus/Polyomavirus/SV40*	konzentriert	15
<b>EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)</b>		
EN 13727 (bakterizid)	konzentriert	1
EN 13624 (levurozid)	konzentriert	1
EN 14348 (tuberkulozid)	konzentriert	1
<b>Flächendesinfektion nach DGHM Methode 2001 (geringe und hohe Belastung)</b>		
Tuberkulozid, mit Mechanik	konzentriert	1

\* DVV 2015 (Susp. Test)

## ÖFFNEN UND ENTNEHMEN



## VERWENDEN DES NACHFÜLLPACKS

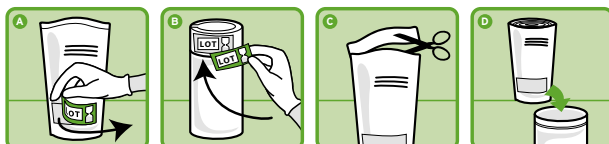

Anschließend Schritte 3–6 ausführen.

**EUROPEAN HEADQUARTERS:**  
**ECOLAB EUROPE GMBH**  
 Richtistrasse 7  
 8304 Wallisellen  
 Switserland  
 +41(0) 44-877-2001  
 www.ecolab.eu



**ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH**  
 Ecolab-Allee 1  
 40789 Monheim am Rhein  
 +49(0) 2173-599-1900  
 www.ecolabhealthcare.de



**SCHNELL.  
 FLEXIBEL.  
 HAUT-  
 VERTRÄGLICH.**



Alkoholische Schnelldesinfektionstücher für medizinische Geräte und kleine Flächen gem. Europäischer Medizinprodukterichtlinie 93/42/EEC



Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Ⓢ BIOZID N-12165

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Zur Desinfektion von medizinischen Geräten und Instrumenten aus alkoholbeständigem Material, Hand- und Winkelstücke in der Zahnarztpraxis, Griffstücke, etc., sowie von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Gegenstände / Flächen abwischen und komplett benetzen. Dose wieder verschließen.

## ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g Tränklösung sind enthalten: 35 g 2-Propanol, 25 g 1-Propanol

## GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

## BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incides® N Dose	6 x 90 Tücher	30 131 50 PZN 018 393 54
Incides® N Nachfüllpack	5 x 90 Tücher	30 131 60 PZN 018 393 60

## LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

**Haltbarkeit nach dem Öffnen:**  
 3 Monate

*BIOZID- UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN. NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.*

