

FLÜSSIGREINIGER, ALKALISCH

Sekumatic® FR

Alkalischer Reiniger zur
maschinellen Instrumentenaufbereitung

**Starke Reinigungsleistung
ohne Schaumentwicklung.**

- ▲ Wirtschaftliche Dosierung
- ▲ Effektive Reinigung
- ▲ Breites Anwendungsspektrum



Sekumatic® FR

Alkalischer Reiniger zur
maschinellen Instrumentenaufbereitung

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Alkalisch und tensidfrei	Besonders starke Reinigungsleistung ohne Schaumentwicklung gegenüber typischen Anschmutzungen aus dem medizinischen Bereich
Optimal abgestimmte Rezepturkomponenten	Ermöglichen eine effiziente und wirtschaftliche Dosierung
Mit Korrosionsinhibitoren	Sehr gute Materialverträglichkeit für langen Werterhalt medizinischer Instrumente

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN		
Dichte	20 °C	1,35 g/ml
pH-Wert* (Konzentrat)	20 °C	ca. 14
pH-Bereich* (Lösung, 3-5 ml/L in VE-Wasser)	20 °C	11,5 - 12
Leitfähigkeit (Lösung, 3-5 ml/L in VE-Wasser)	20 °C	2,5 - 4 mS/cm

* pH-Wert Messungen unter Betriebsbedingungen immer mittels pH-Meter mit Temperaturkompensation.

ALKALISCH. TENSIDFREI.



Instrumentenreiniger
für Medizinprodukte

ANWENDUNGSHINWEISE

In Reinigungs- und Desinfektionsgeräten im medizinischen Bereich mit 3 - 5 ml/L. Einsetzbar bei allen Wasserhärten.

Für die Reinigung chirurgischer Instrumente und andere bei 93 °C thermisch desinfizierbare medizinische Instrumente und Zubehör. Für die anschließende Neutralisation empfehlen wir den Einsatz von 1 - 3 ml/L Sekumatic® FNZ oder Sekumatic® FNP.

Für die anschließende chemisch-thermische Desinfektion: 10 ml/L Sekumatic® FD oder Sekumatic® FDR bei 60 °C für 5 - 10 Minuten.

Zur Reinigung von OP-Schuhen und thermolabilen medizinischen Materialien bei 45 bis 60 °C.

Für die Reinigung von Laborglas und Babyflaschen.

Zur Schlussspülung ist vorzugsweise vollentsalztes Wasser (VE) zu verwenden.

ZUSAMMENSETZUNG

Phosphate, Silikate, Alkalien, Korrosionsinhibitoren; tensidfrei

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Sekumatic® FR Kanister	3 x 5 L	30 236 70 PZN 042 886 30
Sekumatic® FR Kanister	20 L	30 234 80 PZN 033 621 46

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41(0) 44-877-2000
www.ecolab.eu

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49(0) 2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de

