

FLÜSSIGER KLARSPÜLER

Sekumatic® FK

Die effiziente Lösung für die Klarspülung in
Reinigungs- und Desinfektionsgeräten

Gut geeignet für alle metallischen
Instrumente, Glas, Bettgestelle, Trans-
portwagen, Container und OP-Schuhe.

- ▶ Verkürzt Trocknungszeiten
- ▶ Besonders materialschonend
- ▶ Effiziente Dosierung



Sekumatic® FK

Die effiziente Lösung für die Klarspülung in
Reinigungs- und Desinfektionsgeräten

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Reduziert die Oberflächenspannung des Wassers	Verkürzt die Trocknungszeiten und sorgt somit für Energieeinsparungen. Ermöglicht eine fleckenfreie Trocknung des Spülgutes.
Formulierung mit saurem pH-Wert	Schützt das Spülgut und die Maschinen vor Kalkablagerungen
Korrosions- und Wasserhärteinhibitoren	Verwendbarkeit bei allen Wasserhärten. Hoher Materialschutz für lange Werterhaltung von Maschinen und Spülgut.

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Dichte	20 °C	1,05 g/ml
pH-Wert* (Konzentrat)	20 °C	2,1 - 3,1
pH-Wert* (Lösung, 1 ml/L in VE-Wasser)	20 °C	ca. 5

* pH-Wert Messungen unter Betriebsbedingungen immer mittels pH-Meter mit Temperaturkompensation.

EINSATZBEREICHE

Für chirurgische Instrumente, Dental-Instrumente, Kunststoff-Utensilien und Elastomere (aus den Bereichen Anästhesie, Chirurgie und Urologie), Bettgestelle, Transportwagen, Container, OP-Schuhe und für medizinische Glasutensilien und Laborglas. Das Produkt ist schaumarm durch die Verwendung besonders schaumarmer Tenside.

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Schweiz
+41(0)44-877-2000
www.ecolab.eu

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49(0)2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de



KURZE TROCK- NUNGSZEIT. FLECKENFREIE TROCKNUNG.



Klarspüler für
die Aufbereitung von
Medizinprodukten

ANWENDUNGSHINWEISE

Dosierung erfolgt über die Dosierpumpen der Aufbereitungsautomaten bzw. -anlagen. Dosiermenge in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten 0,3 – 1 ml/L.

ZUSAMMENSETZUNG

Nichtionische Tenside, Lösungsvermittler, Korrosionsinhibitoren, Zitronensäure

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Sekumatic® FK Griffflasche	4 x 2 L	30 306 50 PZN 033 621 00
Sekumatic® FK Kanister	3 x 5 L	30 885 00 PZN 125 034 62
Sekumatic® FK Kanister	20 L	30 225 70

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.