

# FLÜSSIGREINIGER, ENZYMHALTIG

## Sekumatic® FRE

Neutralreiniger auf Enzymbasis zur maschinellen  
Instrumentenaufbereitung

---

- ▲ Leistungsstarke Enzymkombination
- ▲ Gute Materialverträglichkeit
- ▲ Breites Anwendungsspektrum



# Sekumatic® FRE

Neutralreiniger auf Enzymbasis zur maschinellen Instrumentenaufbereitung

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Hoher Materialschutz, pH-neutral	Besonders gute Materialverträglichkeit auch gegenüber empfindlichem Spülgut, lange Werterhaltung für alle medizinischen Instrumente
Leistungsstarke Enzymkombination	Starke Reinigungsleistung gegenüber den typischen Anschmutzungen aus dem medizinischen Bereich, auch schon bei niedrigen Temperaturen
Anwenderfreundliche Formulierung	Geruchsneutral, schaumarm, wirtschaftliche Dosierung

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN		
Dichte	20 °C	1,06 g/ml
pH-Wert* (Konzentrat)	20 °C	ca. 5,5
pH-Wert* (Lösung, 3-5 ml/L in VE-Wasser)	20 °C	ca. 5

\* pH-Wert Messungen unter Betriebsbedingungen immer mittels pH-Meter mit Temperaturkompensation.

MATERIAL-  
VERTRÄGLICH.  
GERUCHS-  
NEUTRAL.



Instrumentenreiniger  
für Medizinprodukte

## ANWENDUNGSHINWEISE

In Reinigungs- und Desinfektionsgeräten im medizinischen Bereich mit 2 - 8 ml/L. Einsetzbar bei allen Wasserhärten.

Zur Reinigung von chirurgischen Instrumenten und anderen bei 93 °C thermisch desinfizierbaren medizinischen Instrumenten und Zubehör.

Auch geeignet für die Reinigung von OP-Schuhen und thermolabilen medizinischen Materialien bei 45 bis 60 °C.

Für die anschließende chemisch-thermische Desinfektion empfehlen wir: 10 ml/L Sekumatic® FD oder Sekumatic® FDR bei 60 °C für 5 - 10 Minuten.

Zur Schlussspülung ist vorzugsweise vollentsalztes Wasser (VE) zu verwenden.

## ZUSAMMENSETZUNG

Nichtionische Tenside, Enzyme, Glykole, Lösungsvermittler

## GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

## BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Sekumatic® FRE Kanister	3 X 5 L	30 225 50 PZN 042 886 47
Sekumatic® FRE Kanister	20 L	30 225 40

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

## ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtistrasse 7  
8304 Wallisellen  
Switzerland  
+41(0)44-877-2000  
www.ecolab.eu

## REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
+49(0)2173-599-1900  
www.ecolabhealthcare.de

