

DAS PLUS AN LEISTUNG FÜR ALLE OBERFLÄCHEN

Incidin® Plus

Flächendesinfektionsmittel mit Glucoprotamin®,
aldehydfrei und ohne QAV

**Breites Wirkspektrum gegen
Bakterien (inkl. MRSA, TB) und Hefen.**

Hohe Desinfektionsleistung
allen abwaschbaren Flächen, selbst
in Risikobereichen.

- ▶ Einzigartiger
Wirkstoff Glucoprotamin®
- ▶ Breites Wirkspektrum
- ▶ Hervorragende Reinigungsleistung

**PRAXISNAH NACH
NEUER EN 16615
GETESTET**



**RKI-GELISTET
(A)**



Incidin® Plus

Flächendesinfektionsmittel mit Glucoprotamin®,
aldehydfrei und ohne QAV

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Einziger Wirkstoff Glucoprotamin®	Optimale Desinfektion und Reinigung in Kombination mit vollständiger, biologischer Abbaubarkeit
Hervorragende Reinigungsleistung	Zusatz von Reinigungsadditiven nicht notwendig
RKI-gelistet	Einsetzbar auch im Seuchenfall

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION		EINWIRKZEIT Min.
	%	ml/L	
VAH-Liste (bakterizid, levurozid)			
Flächendesinfektion gemäß DGHM 2001, mit Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	0,25	2,5	240
	0,5	5	60
	1	10	30
	2	20	15
Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie			
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004*	0,25/0,5	2,5/5	30/15
Rotavirus*	0,5	5	30
Adenovirus*	2	20	120
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	3	30	60
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)			
EN 13697 (bakterizid)	0,25	2,5	5
EN 13697 (levurozid)	0,25	2,5	15
EURO-Normen 4-Felder-Test (hohe Belastung)			
EN 16615 (bakterizid)	0,5	5	30
EN 16615 (levurozid)	0,5	5	30
Flächendesinfektion nach DGHM 2001 (geringe und hohe Belastung)			
Mykobakterizid, mit Mechanik	1,5/3	15/30	60/30
RKI-Liste Flächendesinfektion			
Gem. § 18 IfSG (Desinfektion im Seuchenfall)			
Wirkungsbereich A	8	80	360

* DVV 2015 (Susp. Test)

EUROPEAN HEADQUARTERS:
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Schweiz
+41(0)44-877-2001
www.ecolab.eu



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49(0)2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de



ÖKOLOGISCH.
EINZIGARTIG.
VERLÄSSLICH.



Oberflächendesinfektion
für Medizinprodukte



Flüssiges Desinfektionsmittel-
konzentrat zur Desinfektion
von Flächen aller Art.
ⓓ BIOZID N-11720

GEBRAUCHSANWEISUNG

Gebrauchslösung durch Verdünnen mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität (max. 30 °C) in der gewünschten Konzentration ansetzen.

Zu behandelnde Fläche feucht abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten.

Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Amin- bzw. aminderivat-haltige Desinfektionsmittel und aldehyd-haltige Desinfektionsmittel sind nicht im Wechsel anwendbar.

Bei Umstellung ist eine gründliche Zwischenreinigung notwendig.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g ist als Wirkstoff enthalten:
26 g Glucoprotamin®

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin® Plus Dosierbeutel	400 x 20 ml	30 125 20 PZN 006 153 97
Incidin® Plus Dosierflasche	3 x 2 L	30 115 10 PZN 073 281 81
Incidin® Plus Kanister	6 L	30 115 20 PZN 069 525 75
Incidin® Plus Kanister	30 L	30 115 30

LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern.
Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

BIOZID- UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN. NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

