

schülke →



Der Reinigungsverstärker für gigasept® FF ist ein alkalischer Reiniger. Er enthält einen speziellen Korrosionsschutz für Aluminium.

Reinigungsverstärker für gigasept® FF

Unser Plus

- sehr materialschonend
- sehr gute Reinigungskraft bei Blut, Serum und Eiweiß

Anwendungsgebiete

Der Reinigungsverstärker für gigasept® FF wird bei der Aufbereitung von flexiblen Endoskopen zur Vorreinigung oder in Abmischung mit gigasept® FF eingesetzt. [CE]

Anwendungshinweise

1 % Reinigungsverstärker für gigasept® FF immer in die schon fertige Gebrauchslösung von gigasept® FF mit separatem Messbecher zudosieren. Kontakt der beiden Konzentrate vermeiden. Diese Lösung täglich erneuern.

Antrocknen des Konzentrates und der Gebrauchslösung von Reinigungsverstärker für gigasept® FF auf Flächen oder an Instrumenten vermeiden, da ansonsten Bildung unlöslicher Rückstände möglich.

Materialverträglichkeit:

- nicht geeignet für alkaliempfindliche Materialien, z.B. Zink
- für Aluminium geeignet

Anwendungskonzentration/Einwirkzeit:

1 %ig (d.h. 10 ml auf 1 Liter Wasser) der jeweiligen fertigen Gebrauchslösung von gigasept® FF zudosieren. In Abmischung mit gigasept® FF richtet sich die Einwirkzeit nach der für das Desinfektionsmittel vorgegebenen Einwirkzeit.

CE 0297



Reinigungsverstärker für gigasept® FF

Produktdaten

Zusammensetzung:

Kennzeichnung gem. VO (EG) 648/2004: < 5 % Phosphonat

Weitere Inhaltsstoffe: Korrosionsinhibitoren, pH-Regulatoren

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,09 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 100 °C / Methode: ISO 2719
Form	flüssig
pH	ca. 12,7 / 20 °C / Konzentrat

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
Rein. Verst. für gigasept FF 2 l FL	5/Karton	177002

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Wannen-Set 10 l Deckel transp. SE	144508
Wannen-Set 30 l Deckel transp. SE	144608
Wannen-Set 30 l Hahn/Deckel transp SE	144610
Wannen-Set 3 l Deckel transp. SE	144308
Wannen-Set 5 l Deckel transp. SE	144408

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt Reinigungsverstärker für gigasept® FF finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch.

Für individuelle Fragen:

Customer Care

Telefon: +41 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.