

# schülke -+



Alkalischer Pulverreiniger für den  
zahnmedizinischen Bereich

## thermodent® powder

### Unser Plus

- sehr gute Reinigungsleistung
- gute Löslichkeit
- silikatfrei

### Anwendungsgebiete

Für die effektive, maschinelle Reinigung von Instrumenten und Utensilien aus dem zahnmedizinischen Bereich und Labor. Für die Verwendung in allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG) mit Pulverdosisierung geeignet. Instrumente/Utensilien aus eloxiertem Aluminium sind auf Alkalibeständigkeit zu prüfen; nicht geeignet für Hand- und Winkelstücke.

### Anwendungshinweise

Einsatzkonzentration: 0,3 % = 30 g Pulver in die Dosiervorrichtung geben (zwei gestrichene Messlöffel)

CE



## Produktdaten

Zusammensetzung: 30 % Phosphate, < 5 % nichtionische Tenside,

### Chemisch-physikalische Daten

Farbe	weiß
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Form	Granulat
pH	ca. 11 / 3 g/l / 20 °C / in Wasser
Viskosität, dynamisch	Nicht anwendbar

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermodent powder 6 kg EM	1/Eimer	143406

## Verwandte Produkte

- thermodent<sup>®</sup> alka clean
- thermodent<sup>®</sup> clear
- thermodent<sup>®</sup> neutralizer

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com). Für individuelle Fragen: Customer Care  
Telefon: +49 40 52100-666  
E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstrasse 58  
8003 Zürich  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 4665544  
Fax +41 (0) 44 - 4665533  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.  
Seidengasse 9  
1070 Wien  
Österreich  
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-0  
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60  
[www.schuelke.at](http://www.schuelke.at)  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)