

schülke -†



Zum Training und zur Überprüfung der Händedesinfektion.

schülke® optics

Unser Plus:

- fluoreszierende Lösung zur Überprüfung der Händedesinfektion
- zum Kontrollieren der Ergebnisse der Einreibetechnik
- Sichtbarmachen von Lücken unter UV-Licht

Anwendungsmethoden/- hinweise

Wie bei der hygienischen und chirurgischen Desinfektion werden die Hände mit schülke® optics eingerieben. Zum Sichtbarmachen von Benetzungslücken halten Sie die eingeriebenen Hände dann unter die UV-Lampe (366 nm).

Die fluoreszierende Lösung macht es möglich, dass nicht benetzte Hautpartien dunkel erscheinen – die Qualität der Händedesinfektion ist so genau zu bewerten.

Lieferformen

	Art. Nr.
500 ml-Flasche	172 001

Zubehör / Dosierhilfen

	Art. Nr.
Dosierpumpe für 500 ml/1 l	180 303

Detaillierte Informationen finden Sie in der schülke-Präparate-Information „Zubehör und Dosierhilfen“.

Besondere Hinweise

Präparat nicht zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion verwenden.

Nur äußerlich anwenden. Nicht in die Augen bringen. Brennbare Flüssigkeit! Von Zündquellen, offenen Flammen und Kindern fernhalten. Möglichst im Dunkeln und nicht über 25 °C lagern. Behälter dicht geschlossen halten.

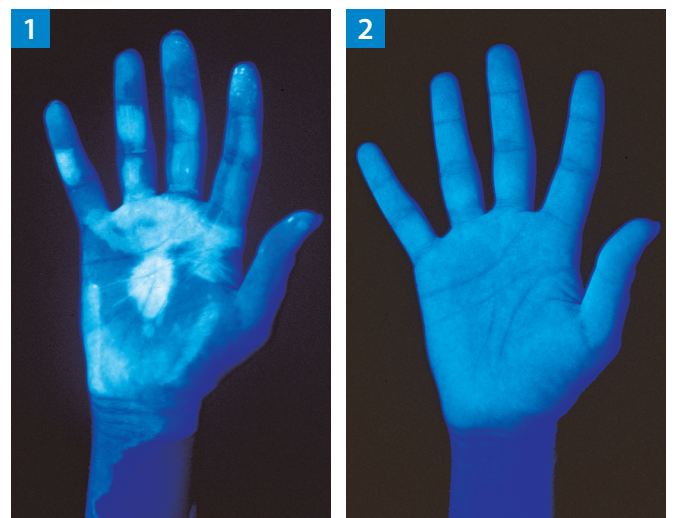


Abb.1:
Desinfizierte Hände mit Benetzungslücken


Es ist deutlich zu erkennen, dass die Partien z. B. an Daumen und Fingerkuppen dunkel gefärbt sind. Hier weist die Benetzung deutliche Lücken auf.

Abb. 2:
So ist es richtig

Keine Benetzungslücken sind zu erkennen – der Beweis für eine einwandfrei durchgeführte Händedesinfektion!

Mangelnde Sicherheit durch eine lückenhafte Händedesinfektion.

Eine perfekte Händedesinfektion ist die wichtigste Maßnahme der Infektionsprävention. Deshalb ist die richtige Anwendung der Mittel entscheidend.

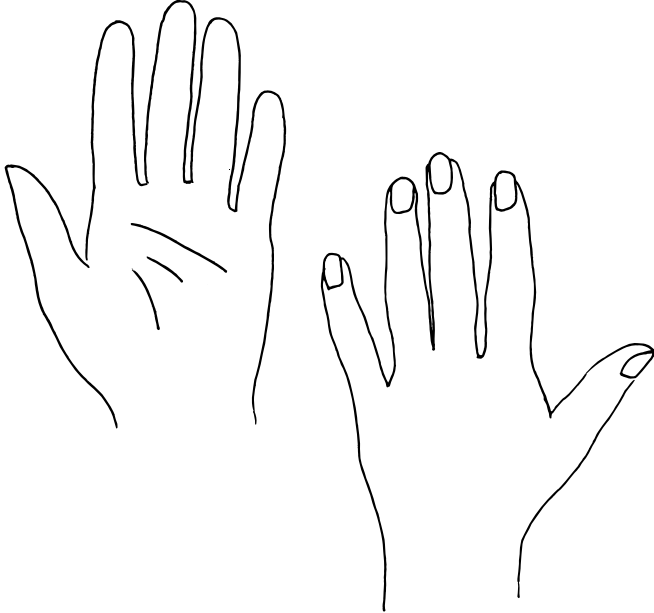

Markieren Sie nach der Anwendung von schülke® optics erkennbare Benetzungslücken auf Handaußen- und -innenfläche.

Beachten Sie auch unsere Flyer und Aufkleber zu den Schritten der hygienischen Händedesinfektion.

Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:
Customer Sales Service
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com

Händedesinfektion – richtig gemacht!



Schritt 1
Handfläche auf Handfläche.



Schritt 4
Außenseite der Finger auf gegenüberliegende Handflächen mit verschränkten Fingern.



Schritt 2
Rechte Handfläche über linkem Handrücken und linke Handfläche über rechtem Handrücken.



Schritt 5
Kreisendes Reiben des rechten Daumens in der geschlossenen linken Handfläche und umgekehrt.



Schritt 3
Handfläche auf Handfläche mit verschränkten, gespreizten Fingern.



Schritt 6
Kreisendes Reiben hin und her mit geschlossenen Fingern der rechten Hand in der linken Handfläche und umgekehrt.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach SAMG Abs.1 und von GMP- Zertifikaten für Arzneimittel.

Ein Unternehmen der Air Liquide- Gruppe.



Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Telefax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com