

Desinfektionstücher

CLEANISEPT® WIPES FORTE MAXI

Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion

- Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung
- Umfangreiche, schnelle Wirksamkeit
- Besonders geeignet zur Desinfektion von mittelgroßen Flächen in Bereichen mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung



Produktbeschreibung

CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI sind alkoholfreie, gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur viruziden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art in Bereichen mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung.

CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI bieten bei der Desinfektion und Reinigung von mittelgroßen Flächen eine universelle und zeitsparende Anwendung. Die Tücher lassen sich einzeln aus der praktischen Packung mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

Anwendungsgebiete

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem, medizinischen Inventar und Flächen aller Art, insbesondere in Bereichen mit erhöhten Wirksamkeitsanforderungen.

Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen, nicht invasiven Medizinprodukten, sowie zur Desinfektion und Reinigung von Ultraschallsonden für transvaginale, transrektale und abdominale Untersuchungen.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeit			2 min
Bakterien und Hefen			
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH** / EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung	●
sporizid (Clostridium difficile)	EN 13704		●
Viren			
viruzid	RKI/DVV	inkl. Polio-, Adeno-, Noroviren und SV40 /Papova/Polyomaviren	●
	EN 14476/ prEN 16777	niedrige Belastung	●
wirksam gegen Polyomaviren	4-Felder-Test / praxisnaher Carriertest		●

*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)
**gelistet in der 5 Min.-Spalte der VAH-Liste

Anwendung

Flächen mit CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Anwendungshinweise

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 28 Tage.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:
0,4 g Alkyl(C12-6)dimethylbenzylammoniumchlorid,
0,2 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.



CLEANISEPT® WIPES FORTE MAXI

Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion


Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Größe	Art. Nr.	PZN
CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI	Packung	54	10 Tücher	20 x 22 cm	00-235-T010	-
	Packung	12	80 Tücher	20 x 22 cm	00-235-T080	12774563
	Packung	6	100 Tücher	20 x 22 cm	00-235-T100	14307305
Zubehör	Wandhalter	-	1		00-902-FPH	

CE 0482

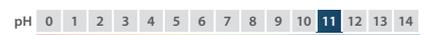

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH. www.schumacher-online.com

