

ICON® Strep A

*Immunchemischer
Antigentest*

*...bringt die Kinder
auf dem schnellsten Weg
zurück zum Spielen*

ICON®  Strep A

ist ein qualitativer Immunoassay zum schnellen Nachweis von Strep A - Antigen aus dem Rachenabstrich.

Der Teststreifen ist in der Anwendung besonders einfach und liefert Ihnen die gewünschte Antwort innerhalb von 5 Minuten, so dass Sie sofort mit der richtigen Therapie starten können.

Mit seiner hohen Sensitivität und Spezifität von 97% bzw. 95% gibt Ihnen dieser Test die Möglichkeit, bei Kindern mit Pharyngitis der Gefahr von Schäden an Gelenken, Herz oder Nieren von Beginn an konsequent mit einer gezielten Antibiotikatherapie entgegen zu wirken.




 **BECKMAN
COULTER**
Primary Care Diagnostics

ICON® Strep A

Leistungsmerkmale

In einer Studie in drei medizinischen Zentren erzielte man bei 499 Patienten mit Symptomen einer Pharyngitis folgende Ergebnisse:

ICON®  Strep A <i>Test vs. Kultur</i>		
Sensitivität	97%	120/124
Spezifität	95%	355/375
Genauigkeit	95%	475/499
PPV	86%	120/140
NPV	99%	355/359

Bei 475 der 499 Patienten erhalten Sie ohne Kultur innerhalb von 5 Minuten das richtige Ergebnis!

Immunchemischer ICON® Strep A Antigentest

- 25 Teststreifen
- 25 Einmal-Teströhrchen zur Extraktion
- 25 sterile Abstrichtupfer
- 1 Fl. Reagenz A
- 1 Fl. Reagenz B
- 1 Fl. Positivkontrolle
- 1 Fl. Negativkontrolle
- 1 Gebrauchsanweisung

Lagerung bei Raumtemperatur


Bestell-Nr.: 72025

ICON® Strep A

GEBRAUCHSANWEISUNG - Lesen Sie die Produktanweisungen bevor Sie den Test durchführen

Patientenproben

- Die Flasche senkrecht halten. Geben Sie 4 Tropfen von Reagenz A und 4 Tropfen von Reagenz B in dasselbe Reagenzröhrchen.
 - Zum Mischen der Flüssigkeit leicht gegen das untere Ende des Reagenzröhrchens klopfen.

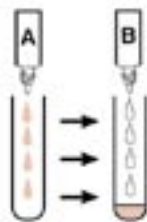


- Führen Sie den Abstrichtupfer in das Röhrchen ein.
 - Drehen Sie den Tupfer 10 x hin und her.
 - Dann 1 Minute lang im Röhrchen belassen.
 - Tupfer aus dem Röhrchen nehmen. Drücken Sie den Tupfer gegen die Röhrcheninnenwand und dann beim Herausziehen des Tupfers das Reagenzröhrchen so zusammen, dass der Großteil der Flüssigkeit im Röhrchen verbleibt.



- Geben Sie den Teststreifen in das Röhrchen.
 - Die Flüssigkeit sollte bis zur oder knapp unter die MAX Linie reichen.
 - Lesen Sie nach 5 Minuten das Ergebnis ab.



Interpretation der Ergebnisse

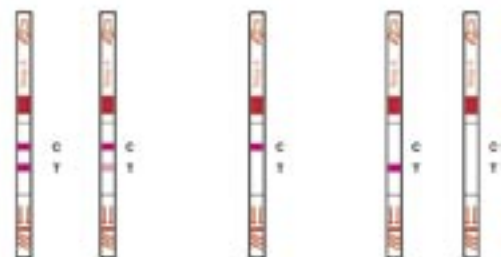

POSITIV

NEGATIV

UNGÜLTIG



Primary Care Diagnostics