


miro-polycast

synthetischer Stützverband aus Polyestergewebe

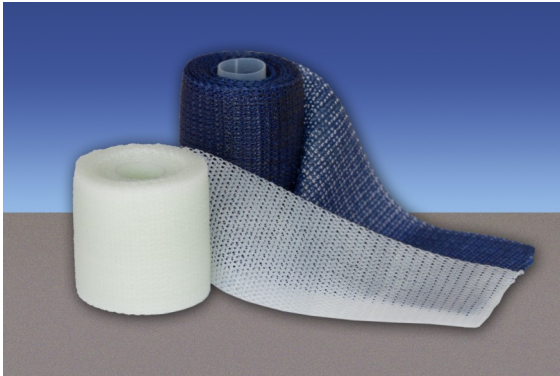

miro-polycast ist ein leichter Stützverband mit hoher Stabilität, der sich gut den Körperkonturen anpasst. Ausgehärtete Castverbände sind sehr leicht, robust und röntgenstrahlendurchlässig. Das offenporige Gewebe ist luftdurchlässig. Die Binden sind einzeln in luftdichte Folie eingesiegelt.

Bei Anwendung des Verbandes bitte Handschuhe tragen.

Anwendungsgebiete:

- für die Versorgung von Frakturen und orthopädischen Korrekturen
- Post-operative Ruhigstellung
- Verstauchungen und Verrenkungen, die eine fokussierte Immobilisation erfordern
- eignet sich insbesondere für zirkuläre Castverbände und die funktionelle Casttherapie

Technische Details:

- Bandage sollte in 20°C– 25°C warmes Wasser getaucht werden
- etwa 3 Sekunden eintauchen, mehrmals auswringen
- Bandage wird sich nach ca. 3-5 Minuten erhärten
- Belastung: nach etwa 20 Minuten
- Lagerung der ungeöffneten Rollen an kalten trockenen Orten
- Unterschied in der Farbgebung kann im feuchten Zustand auftreten, dies stellt sich aber beim Trocknen wieder ein

Bestellinformationen:

| Breite | Art-N° | PZN | Länge | VE |
|--------|--------|----------|----------|--------|
| 5cm | 12005 | 00913829 | ca. 3,6m | 10 St. |
| 7,5cm | 12008 | 00916495 | ca. 3,6m | 10 St. |
| 10cm | 12010 | 00928340 | ca. 3,6m | 10 St. |
| 5cm | 12105 | 00936256 | ca. 3,6m | 10 St. |
| 7,5cm | 12108 | 00936279 | ca. 3,6m | 10 St. |
| 10cm | 12110 | 00936339 | ca. 3,6m | 10 St. |

(Länge ungedehnt)

Materialzusammensetzung:

Polyestergewebe mit Polyurethanharz imprägniert
 41,0% Polyester
 52,5% Polyurethan
 3,2% Silikon
 3,3% Katalysatoren

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

| | |
|--|---------------------------------|
| Dehnung ca. (in %): | entfällt |
| Sterilisation: | unsteril |
| waschbar bis: | entfällt |
| CE-Kennzeichnung: | CE |
| Zolltarifnummer: | 9021.1090 |
| Haltbarkeit: | 3 Jahre |
| Klassifizierung: | I unsteril |
| Anhang: | I und VII, nach RL 93/42 EWG |
| Regel: | 1 |
| Produkt zum einmaligen Gebrauch | ja |

miro Verbandstoffe GmbH
 In den Wiesen 3
 D-51674 Wiehl
 Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0
 Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48
 info@miro-verbandstoffe.de
 www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.