

FLÄCHEN-
DESINFIZIERUNGSMITTEL



INSTRUMENTEN-
DESINFIZIERUNGSMITTEL

Lysoformin® 2000

Desinfektions- und Reinigungskonzentrat
für Flächen, Inventar und
medizinische Instrumente



CE 0482

Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Lysoformin® 2000
Konzentrat

ZUSAMMENSETZUNG

100,0 g **Lösung** enthalten:
13,0 g Formaldehyde, 3,6 g Glyoxal, 3,2 g Glutaral

ANWENDUNGSGEBIETE

- Bei allen bakteriellen (inkl. Tbc), Virus- und Hautpilz-Infektionen zur **Desinfektion** und **Reinigung** von Flächen, Inventar und Instrumenten **in einem Arbeitsgang**, auch für die Desinfektion von textilen Materialien wie Scheuertücher und Mops geeignet.
- Bekämpfung des infektiösen Hospitalismus.
- Desinfektion und Reinigung hautpilzkontaminierter Fußböden und Gegenstände (Badematten und -roste, Schuhe, Strümpfe u. a.).
- Desinfektion und Reinigung von Atemschutzmasken und Atemschutzgeräten.
- Desinfektion und hygienische Sauberhaltung aller sanitären Einrichtungen.
- Desinfektion und Reinigung von Sonnenbänken.
- Auch für den Einsatz in Ultraschallbecken geeignet.

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Lysoformin® 2000 ist ein flüssiges Konzentrat, mit dem jede gewünschte Gebrauchsverdünnung durch Zugabe von Wasser (max. Zimmertemperatur) hergestellt werden kann. Immer erst Wasser einfüllen und dann **Lysoformin® 2000** zugeben.

Wisch-Desinfektion und -Reinigung von Flächen

zur Hospitalismus-Prophylaxe und in der allgemeinen Praxis	0,5% - 4h 1 % - 1h
zur Bekämpfung von Pilzen auf rohem Holz	2 % - 30 min. 1,5% - 4h 2 % - 1h
zur Inaktivierung von Hepatitis B-Viren und AIDS-Erreger/HIV	5 % - 2h
Seuchenbekämpfung gem. § 18 Infektionsschutzgesetz (IfSG)	4 % - 6h

Einlege- bzw. Tauchdesinfektion von med. Instrumenten

(inkl. Tbc)	2 % - 1h
einschl. Mycobact. terrae	3 % - 45 min.
Textilien (Mop, Scheuertuch u. a.)	0,5% - 4h

Lysoform · Hygiene mit System

Konzentration	0,5 %	1 %
Dosiersystem (auf 8 Liter Gebrauchslösung)		
Dosierpumpe (1 Hub = 20 ml)	2 Hübe	4 Hübe
Lysoform-Dosierhilfe	einmalige Einstellung auf die gewünschte Konzentration	

Warn- und Lagerhinweise

- Desinfektionsmittel, unzugänglich für Kinder, bei 5-30°C aufbewahren!
- Beim Umgang mit dem Präparat geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.
- Haltbarkeit der unbelasteten Gebrauchslösung: 14 Tage.

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin, Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99-269

EIGENSCHAFTEN

- bekämpft Bakterien (inkl. Tbc), Pilze und Viren
- umfassend wirkendes, materialschonendes Flächen-, Inventar-, Textilien- und Instrumenten- Desinfektionsmittel
- reinigungsaktiv ohne Zusatz von Reinigungsmitteln
- kalkwasserfest
- biologisch abbaubar

BESONDERE HINWEISE

- Inkompatibilität
Durch Beimischung üblicher Reinigungsmittel kann die desinfizierende Wirkung von **Lysoformin® 2000** eingeschränkt bzw. aufgehoben werden.
- Gegenmaßnahmen bei unsachgemäßem Gebrauch
Sollte das Präparat **Lysoformin® 2000** durch unsachgemäßen Gebrauch in Kontakt mit Schleimhäuten (Augen, Rachen, Magen etc.) gekommen sein, muß sofort ein Arzt aufgesucht werden.
Als Sofortmaßnahme wird die Verdünnung des Präparates empfohlen: bei oraler Einnahme **reichlich** Wasser trinken, bei Kontakt mit den Augen **reichlich** mit Wasser spülen.
- Sonstiges
Gegenstände/Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind nach abgeschlossener Desinfektion mit Trinkwasser nachzuspülen!
- Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Zertifiziert und in den einschlägigen Listen aufgeführt.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG


	Art.-Nr.
12 x 1-Liter-Flasche	5419
2 x 5-Liter-Kanister	5415
1 x 20-Liter-Kanister	5470

Zubehör

Dosierpumpe für 5-Liter-Kanister (1 Hub = 20 ml) 3135

Hygiene-Technik

Lysoform-Dosierhilfe 9174

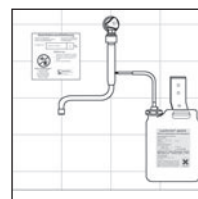

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an.
Wir rufen sofort zurück.

D: 030 - 77 99 2-0



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin
Telefax 030 - 77 99 2-269, Info.-Telefon 0700LYSOFORM
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de



LYSOFORM
Schweizerische Gesellschaft für Antiseptik AG
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14