

neodisher[®] SBR extra

Reiniger zum Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Steckbecken
Flüssigkonzentrat



Hauptanwendungsbereiche:	Zur Reinigung von Steckbecken und Urinflaschen in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Steckbecken.
Eigenschaften:	neodisher SBR extra ist ein flüssiger Spezialreiniger in schaumarmer Einstellung. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Kalkseifenränder und Rückstände von Cytostatika aus menschlichen Ausscheidungen. neodisher SBR extra kann bei allen Wasserhärten eingesetzt werden.
Anwendung und Dosierung:	neodisher SBR extra ist in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Steckbecken verwendbar, die mit einer Dosierpumpe für Reinigungsmittel ausgestattet sind. Die Dosiermenge beträgt: 1 - 3 ml/l je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad im Reinigungsschritt. In geeigneten Maschinentypen kann neodisher SBR extra auch zur Kalkabbindung und Nachspülung eingesetzt werden. Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen. Die Bedienungsanweisungen der Reinigungs- und Desinfektionsgerätehersteller sind zu beachten. Nicht mit anderen Produkten mischen. Die Aufbereitung muss entsprechend der RKI-Richtlinie und der Medizinprodukte-Betreiberverordnung mit geeigneten Verfahren durchgeführt werden. Nur für gewerbliche Anwendungen.
Technische Daten:	Dichte (20 °C): 1,2 g/cm ³ pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 1 - 3 ml/l: 11,2 – 11,5 Viskosität (Konzentrat, 20 °C): < 50 mPa s
Inhaltsstoffe:	Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG- Detergenzienverordnung 648/2004: < 5 % Phosphonate 15 - 30 % EDTA
CE- Kennzeichnung: CE	neodisher SBR extra erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang 1 über Medizinprodukte
Lagerhinweise:	Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre verwendbar. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:	Einstufung und Kennzeichnung gemäß Zubereitungsrichtlinie 99/45/EG für das Konzentrat. Gefahrensymbol Xi - reizend Gefahrenhinweise: R 38 - Reizt die Haut. R 41 - Gefahr ernster Augenschäden Sicherheitsratschläge: S 26 - Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 36/37/39 - Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S 46 - Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Merkblatt vorzeigen. Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt. Weitere Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar.

MB 4007/2-3
04/10



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0
Telefax: (040) 789 60 - 120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.