



DESOMED RAPID AF

Alkoholische Schnelldesinfektion

VAH

- + Kurze Einwirkzeit
- + Umfassende Wirksamkeit gegenüber Viren
- + Angenehmer, frischer Duft



DESOMED RAPID AF ist in Krankenhäusern, Arztpraxen und Einrichtungen zur Pflege die ideale Lösung in Bereichen, wo Oberflächen oder Medizinprodukte nach der Desinfektion schnell wieder verfügbar sein müssen. Es ist angenehm im Duft und weist ein umfassendes Wirkungsspektrum auf.

Anwendungsgebiete

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):

Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet.

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung:

Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nicht-invasiven Medizinprodukten.

Anwendung

Zur vollständigen Benetzung die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:
42 g Ethanol, 0,05 g Didecylmethylammoniumchlorid. Enthält Duftstoffe.

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Wirksamkeiten und Prüfmethode			30 Sek.	1 Min.	2 Min.	5 Min.	30 Min.
Bakterien und Hefen							
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid	VAH / EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung			•		
	VAH / EN 13697	ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung		•			
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung		•			
mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	EN 14348	niedrige Belastung			•		
Viren							
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	•				
	EN 14476	niedrige Belastung	•				
		hohe Belastung	•				
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung				•	
wirksam gegen Rotaviren	RKI/DVV			•			
Ergänzende Prüfergebnisse							
bakterizid	EN 1040		•				
	EN 1276	niedrige Belastung		•			
	EN 13727	niedrige Belastung	•				
		hohe Belastung		•			
	EN 13697	niedrige Belastung		•			
levurozid (Candida albicans)	EN 1275		•				
	EN 1650	niedrige Belastung		•			
	EN 13624	niedrige Belastung		•			
		hohe Belastung		•			
	EN 13697	niedrige Belastung		•			
fungizid (Aspergillus brasiliensis)	DGHM	niedrige Belastung					•



DESOMED RAPID AF

Alkoholische Schnelldesinfektion

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten.

Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT

DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/ Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
DESOMED RAPID AF	Descoflexflasche	500ml	20	DT-311-005	3174189
	Descoflexflasche	1L	10	DT-311-010	3174195
	Keulenflasche	1L	12	DT-311-010-01	
	Kanister	5L	3	DT-311-050	3007847
	Kanister	10L	1	DT-311-100	3007876



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.