



DESOMED RAPID PUR

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

- + Schnelle Wirksamkeit
- + Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich
- + Rückstands- und parfümfrei



VAH

IHO

DESOMED RAPID PUR als alkoholische Schnelldesinfektion ist vor allem in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich, aber auch in Krankenhäusern, Arztpraxen und Einrichtungen zur Pflege zur schnellen Desinfektion von Oberflächen oder Medizinprodukten geeignet. Es ist frei von Parfüm und trocknet rückstandsfrei ab.

Anwendungsgebiete

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):

Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.

Gem. Medizinproduktegesetz (MPG):

Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven, alkoholbeständigen Medizinprodukten.

Anwendung

Die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: Ethanol 45,0 g.

Wirksamkeit und Einwirkzeiten

			30 s	1 min	3 min	5 min
Bakterien und Hefen						
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH/ EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung				•
	VAH/ EN 13697	ohne Mechanik, hohe Belastung				•
Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	EN 13697	ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung		•		
	VAH	mit Mechanik, hohe und niedrige Belastung		•		
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung	•			
mykobakterizid (M.avium und M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung		•		
Viren						
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	niedrige Belastung			•	
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	•			
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige Belastung	•			
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung			•	
wirksam gegen Noroviren	EN 14476	niedrige Belastung		•		
Ergänzende Prüfergebnisse						
bakterizid	EN 13727	hohe und niedrige Belastung		•		
	EN 1276	hohe und niedrige Belastung		•		
	EN 13697	ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung		•		
levurozid (C. albicans)	EN 13624	hohe und niedrige Belastung		•		
	EN 1650	hohe und niedrige Belastung		•		
	EN 13697	ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung		•		

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)



DESOMED RAPID PUR

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
DESOMED RAPID PUR	Flasche	1L	10	DT-323-010CH	2535024
	Kanister	5L	3	DT-323-050CH	2290597

CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.