



# BIGUAMED PLUS

## Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

- + Hervorragende Reinigungsleistung
- + Umfassendes Wirkspektrum
- + Ausgezeichnete Materialverträglichkeit



VAH  
IHO  
ÖGHMP

**BIGUAMED PLUS** ist ein flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und bewohnbaren Bereichen sowie von nichtinvasiven Medizinprodukten. Das Produkt ist universell einsetzbar für Flächen im Wohn- und Sanitärbereich.

**BIGUAMED PLUS** zeichnet sich durch eine hohe Reinigungsleistung sowie ein speziell für die Routineanwendung in der stationären und ambulanten Pflege abgestimmtes Wirkspektrum aus. Die innovative Zusammensetzung gewährleistet eine streifenfreie Abtrocknung bei der Anwendung. **BIGUAMED PLUS** ist geruchsneutral und parfümfrei.

### Anwendungsgebiete

#### Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG):

Zur Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten.

#### Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):

Zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und Inventar in medizinischen, industriellen, privaten und öffentlichen Bereichen.

### Anwendung

Flächenwischdesinfektion: Die zu desinfizierenden Flächen mit der **BIGUAMED PLUS** Gebrauchslösung vollständig benetzen und mechanisch verteilen (Scheuer-Wisch-Desinfektion) und abtrocknen lassen. In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder genutzt werden. **BIGUAMED PLUS** eignet sich besonders zur Verwendung im Vliestuchspendersystem.

### Anwendungshinweise

**BIGUAMED PLUS** nicht im direkten Wechsel mit aldehydhaltigen Produkten verwenden. Bei Bedarf eine Zwischenreinigung durchführen.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			5 min	15 min	30 min	60 min	240 min
<b>Bakterien und Hefen</b>							
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH/ EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung	2,50%	1,50%	1%	0,50%	
tuberkulozid (M.terrae)	EN 14348	hohe Belastung				1,50%	
		niedrige Belastung					0,50%
fungizid (Aspergillus brasiliensis)	VAH	hohe Belastung				3%	
<b>Behüllte Viren</b>							
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	1%			0,50%	
<b>Unbehüllte Viren</b>							
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung	2%	1%		0,50%	
		hohe Belastung	2%	1%			
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung		2%		1%	
		hohe Belastung			2%	1%	
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige Belastung	0,50%				

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)





## BIGUAMED PLUS

### Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

#### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:

6,6 g Alkyl (C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid,

2,3 g Didecyldimethylammoniumchlorid,

7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.

Enthält: < 5 % nichtionische Tenside.

#### Materialverträglichkeit

Verträglich mit Metallen, Buntmetallen, Bodenmaterialien wie PVC, Linoleum, Kacheln, Fliesen sowie Kunststoffen (Acrylglas, POM, PP, PE, PA, PS), Gummi und Silikon.

Nicht zu verwenden auf Materialien wie Polycarbonat, sowie porösen Materialien, unbehandelten und lackierten Holzoberflächen.

#### Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

#### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/

duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Produkt	Gebinde	VE	PZN	Art. Nr.
BIGUAMED PLUS	1 L Flasche	10	12437127	DT-245-010
	5 L Kanister	3	12437133	DT-245-050

CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.